

top.lign professional
«топ.лайн профессионал»



**Пластмасса холодной полимеризации
для временных и постоянных зубных протезов**

bredent

Чем отличается top.lign professional «топ.лайн профессионал»?

Подходит для временных и постоянных изделий

- Допустим для временных и постоянных протезов.
- Сертифицирован как медицинский продукт класса II а.

Высокопрочный и физиологичный

- Превосходные механические значения (прочность на изгиб: около 100 МПа, модуль упругости: около 2600 МПа) позволяют создавать идеальное сочетание необходимой стабильности протеза и физиологической эластичности.
- Вдвойне более прочные мостовидные протезы (по сравнению с временными полимерными изделиями, продаваемыми на рынке).
- Особенно подходит для работ по имплантационному протезированию.

Устойчив к изменению цвета и возникновению зубного налета

- Компактная молекулярная структура материала позволяет полировать его до зеркального блеска и предотвращает отложение зубного налета.
- Благодаря полному «сшиванию» материала уменьшается влагоемкость, не возникает пожелтения или иного изменения цвета.

Превосходно полируется и имеет стабильные кромки

- Отличные полировочные свойства позволяют крайне быстро и просто обрабатывать материал.
- Оптимальная шлифовка благодаря высокой стабильности кромок.

Эстетичный

- Идеальный эстетичный внешний вид благодаря комплексному предложению и полному ассортименту в классических цветах А–D.
- Благодаря молекулярной структуре и применению люминесцентных красок даже монолитно изготовленные протезы имеют весьма естественный вид.
- Возможно эстетичное индивидуальное исполнение с помощью облицовочного композита сrea.lign® «креа.лайн» (сочетающиеся между собой шкалы цветов).

Надежный и эффективный

- Заливка без образования пузырьков.
- Точные результаты.
- Безззорное соединение с облицовочными оболочками и цельными зубами без необходимости дополнительного химического бондинга.



Показания

Временное протезирование

Мосты, подвергающиеся немедленной нагрузке, на имплантатах или естественных зубах; материал подходит даже для временных конструкций, которые рассчитаны на длительный срок (срок службы > 6 месяцев)

- Несъемные и условно-съемные
- С облицовочными оболочками и без
- С поддержкой каркаса и без

Подлежащий немедленной нагрузке мост на имплантатах



Подлежащий немедленной нагрузке мост, монолитно изготовленный из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Изображения: МЗТ Себастиан Шульдес (ZTM Sebastian Schuldes), Айзенах, Германия



Отлитый протез



Протез в полости рта пациента

Временный протез на естественных зубах



Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Изображения: ЗТ Андреа Фоски (ZT Andrea Foschi), Равенна, Италия



Начальные условия



Протез в полости рта пациента

Постоянное протезирование

Протезы на имплантатах

- Условно-съемные и съемные (например, балочные протезы)
- С облицовочными оболочками, цельными зубами или crealign «креа.лайн»
- С поддержкой каркаса

Частичные и полные протезы

- Телескопические протезы
- Отливка кламмерной модели

Постоянный протез на имплантатах



Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и обработанной десны, индивидуализирован с помощью crealign «креа.лайн» *Изображения: ЗТ Кристиан Далла Либера (ZT Christian Dalla Libera), Падуа, Италия*



top.lign professional «топ.лайн профессионал» в необработанном виде




Протез в полости рта пациента

Съемный протез



Кламмерный протез из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и облицовочных оболочек novo.lign «новолайн»

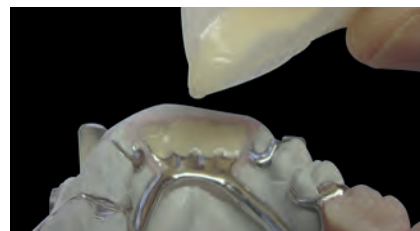

Заливка top.lign professional «топ.лайн профессионал» в предварительную матрицу



Протез на модели

Новый эталон...



Изображения:
ЗТ Антонио Лазеттера (Antonio Lazetera), Савона, Италия

...для эффективного изготовления рассчитанных на длительный срок временных конструкций и постоянных зубных протезов в области протезирования на имплантатах

- Подходит для временных и постоянных изделий
- Высокопрочный и физиологичный
- Устойчив к изменению цвета и возникновению зубного налета
- Превосходно полируется и имеет стабильные кромки
- Эстетичный
- Надежный и эффективный

Разновидности изделий top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»



Компактная система со всеми классическими цветами А–D

Цвет колпачка	Материал	Цвета	40 г*	80 г*	200 г*
			№	№	№
	Шейка зуба 1	—	proCV101		proCV102
	Шейка зуба 2	—	proCV201		proCV202
	Эмаль 1	—	proEN101	proEN108	proEN102
	Эмаль 2	—	proEN201	proEN208	proEN202
	Прозрачный		proTran1		proTran2
	Осветленный		proBL301		proBL302
	Дентин А1		proDA101	proDA108	proDA102
	Дентин А2		proDA201	proDA208	proDA202
	Дентин А3		proDA301	proDA308	proDA302
	Дентин А3,5		proDA351	proDA358	proDA352
	Дентин А4		proDA401	proDA408	proDA402
	Дентин В1		proDB101	proDB108	proDB102
	Дентин В2		proDB201	proDB208	proDB202
	Дентин В3		proDB301	proDB308	proDB302
	Дентин В4		proDB401	proDB408	proDB402
	Дентин С1		proDC101	proDC108	proDC102
	Дентин С2		proDC201	proDC208	proDC202
	Дентин С3		proDC301	proDC308	proDC302
	Дентин С4		proDC401	proDC408	proDC402
	Дентин D2		proDD201	proDD208	proDD202
	Дентин D3		proDD301	proDD308	proDD302
	Дентин D4		proDD401	proDD408	proDD402

*также доступно в наборе

Когда работа должна выполняться быстро...

Просто смешайте 70 % дентина с 30 % эмали и сэкономьте себе целый этап работы.

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»




Жидкость top.lign professional
«топ.лайн профессионал»

100 мл, № proLiq01
500 мл, № proLiq05

Совет:

Для эстетичного индивидуального исполнения используйте облицовочный композит **crea.lign®** «креа.лайн» в сочетании с фасетками **novo.lign®** «ново.лайн» из системы **visio.lign®** «визио.лайн».

Еще одно интересное предложение для Вас

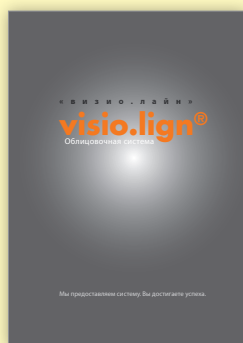

REF 009504 RU

bredent

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · @: info@bredent.com

