

« В И З И О . Л А Й Н »

**visio.lign®**  
Облицовочная система

Мы предоставляем систему. Вы достигаете успеха.



Естественная эстетика для разработки идеальных имплантологических решений за счет применения превосходно сочетающихся полимеров и композитов.

« В И З И О . Л А Й Н »

**visio.lign<sup>®</sup>**  
Облицовочная система

«ВИЗИО.ЛАЙН»

## Показания к применению системы visio.lign®

- Временное немедленное протезирование
- Протезы на имплантатах
- Работы по установке мостов,  
балочных соединений и фиксаторов
- Винирная техника
- Внутренние вкладки – наружные вкладки – оверлей-вкладки
- Съёмные и несъёмные протезы

«ВИЗИО.ЛАЙН»

## Преимущества visio.lign®

- + Стабильность цвета
- + Устойчивость к образованию бляшек
- + Воспроизводимая эстетика благодаря  
предварительно изготовленным облицовочным оболочкам
- + Абразивные свойства, близкие к свойствам естественных зубов
- + Прочность сцепления со всеми каркасными материалами  
*(проверено в университете!)*
- + Гнатологическая совместимость
- + Стандартизация процедуры обработки
- + Индивидуальное свободное наложение
- + Оптимальный вариант для финишной обработки и покрытия  
изготовленных с использованием системы CAD-CAM протезов  
методом разбавления
- + Устранение сколов на уровне керамики
- = Превосходный вариант для эстетичного имплантатного  
протезирования и установки съёмных и несъёмных протезов

«ВИЗИО.ЛАЙН»

## Компоненты системы visio.lign®

### Установка

Установочные воски и  
силиконы для предварительной матрицы

beauty setup «бьюти сетап»  
visio.sil «визио.сил»

Страница

8  
8 - 9

Винировые фасетки и  
цельные зубы

novo.lign «ново.лайн»  
neo.lign «нео.лайн»

12 и 14  
13 и 15

### Сцепление

Композитный цемент и  
Праймер

combo.lign «комбо.лайн»  
MKZ Праймер  
Активатор MKZ EM  
K Праймер  
visio.link «визио.линк»

19  
18  
18  
18  
18

Опакер

Опакер combo.lign «комбо.лайн» (и катализатор)  
Опакер crea.lign «креа.лайн»  
Опакер crea.lign «креа.лайн» Z, лайнер для циркония

19  
19  
19

### Покрытие

Красители

visio.paint «визио.пейнт»

22

Моделирующая жидкость

Моделирующая жидкость  
crea.lign «креа.лайн»

22

Композиты/облицовочные материалы

Гель crea.lign «креа.лайн»  
Паста crea.lign «креа.лайн»  
crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз»  
Кольца с образцами цвета  
crea.lign «креа.лайн»

23  
23  
23  
23  
23

### Дополнительные продукты

Наборы

Кейсы и чемоданчики  
Наборы visio.lign® «визио.лайн»  
Наборы novo.lign «ново.лайн»  
Наборы neo.lign «нео.лайн»  
Наборы crea.lign «креа.лайн»  
Опакеры, красители и  
наборы для обработки

26 - 27  
28 - 30  
31  
32  
33 - 36  
37

Аппараты, инструменты и  
принадлежности

bre.Lux Power Unit «бре.люкс Пауэр Юнит»  
Набор инструментов visio.lign® «визио.лайн»  
Инструменты/расходные материалы  
Шкаф для зубов visio.lign® «визио.лайн»

40  
41  
42 - 44  
45

Таблицы схем и  
комбинаций

Матрица для обработки материалов  
Совместимые с системой устройства  
фотополимеризации других производителей  
Время полимеризации при использовании  
bre.Lux «бре.Люкс»  
Соотношение цветов:  
опакер crea.lign «креа.лайн»,  
опакер combo.lign «комбо.лайн»  
crea.lign «креа.лайн» от  
оттенка дентина (Dentin) до  
оттенка эмали (Enamel)

48  
49  
49  
50  
50  
50



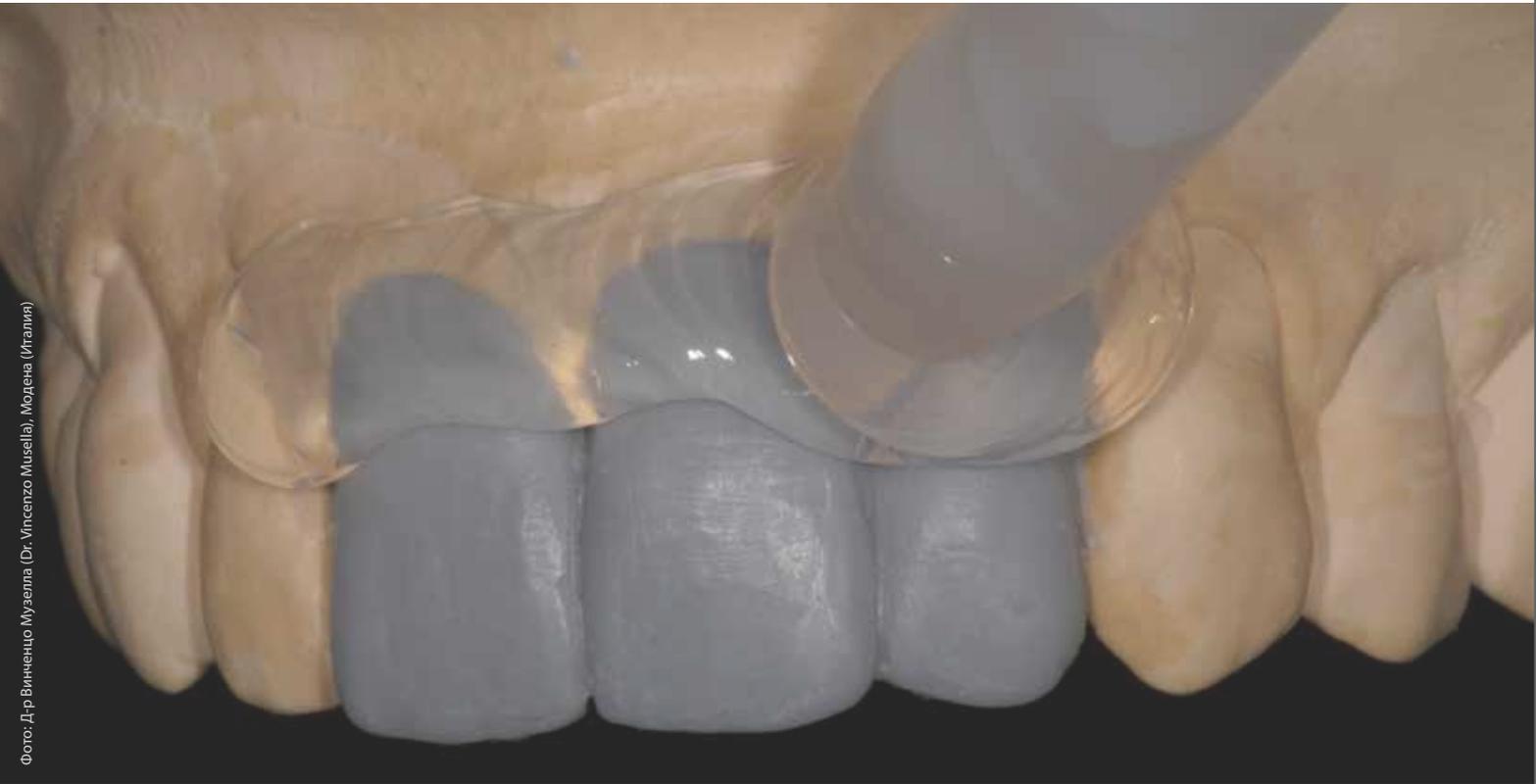


Фото: Д-р Винченцо Музелла (Dr. Vincenzo Musella), Модена (Италия)

## Установочные воски и силиконы для предварительной матрицы



## Воск beauty setup «бьюти сетап»

фиксирующий воск цвета дентина для проверки эстетичности

Воск beauty setup «бьюти.сетап» – это разработанный для вининовых фасеток novo.lign «ново.лайн» воск цвета дентина для фиксации данных вининовых фасеток с целью

проверки эстетичности. Путем смешивания двух различных красителей можно получать все оттенки классической цветовой шкалы A-D.



светлый  
hell



темный  
dunkel



## visio.sil fix «визио.сил фикс»

высококачественный силикон для предварительной матрицы  
твердость по Шору А прибл. 55

visio.sil fix «визио.сил фикс» – это предназначенный для точного нанесения силикон аддитивной шивки для предварительной матрицы. visio.sil fix «визио.сил фикс» позволяет снимать идеальный и максимально четкий оттиск с межзубного пространства

и десен в процессе припасовки восковой модели протеза. После изготовления протез требует лишь полировки до глянцевого блеска, что сокращает объем работы и экономит время.



желтый  
gelb



## visio.sil «ВИЗИО.СИЛ»

прозрачный силикон для предварительной матрицы  
твердость по Шору А прибл. 60

visio.sil «визио.сил» – это прозрачный силикон аддитивной шивки для изготовления светопропускающих предварительных

матриц для применения и обработки фотополимеризирующихся материалов.



прозрачный  
transparent



Преимущества прозрачных силиконов для предварительной матрицы visio.sil «визио.сил» и visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти»

Силиконы для предварительных матриц visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти» пропускают свет. Благодаря этому затвердевание приклеиваемых винировых

фасеток происходит без снятия предварительной матрицы.



## visio.sil ILT «ВИЗИО.СИЛ Ай-Эл-Ти»

прозрачный силикон для предварительной матрицы для «технологии обратного послойного наложения» («Inverse Layering Technique») твердость по Шору А прибл. 75

Воск visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти» разработан специально для применения в сочетании с технологией обратного наложения материала (Inverse Layering Technik). Данный прозрачный силикон аддитивной шивки для предварительной матрицы отличается высокой твердостью по Шору А, которая составляет 75. Его текучесть позволяет снимать оттиск с межзубного пространства

и идеально воспроизводить структуру поверхности, при этом он хорошо держит форму, что обеспечивает возможность предельно точного нанесения. В отвержденном состоянии visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти» можно применять в ротовой полости пациента (медицинский продукт класса I).



прозрачный  
transparent




Преимущества прозрачного силикона для предварительной матрицы visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти»

Силикон для предварительной матрицы visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти» подходит для орального приме-

нения и может использоваться для позиционирования и приклеивания не прямых виниров.

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.



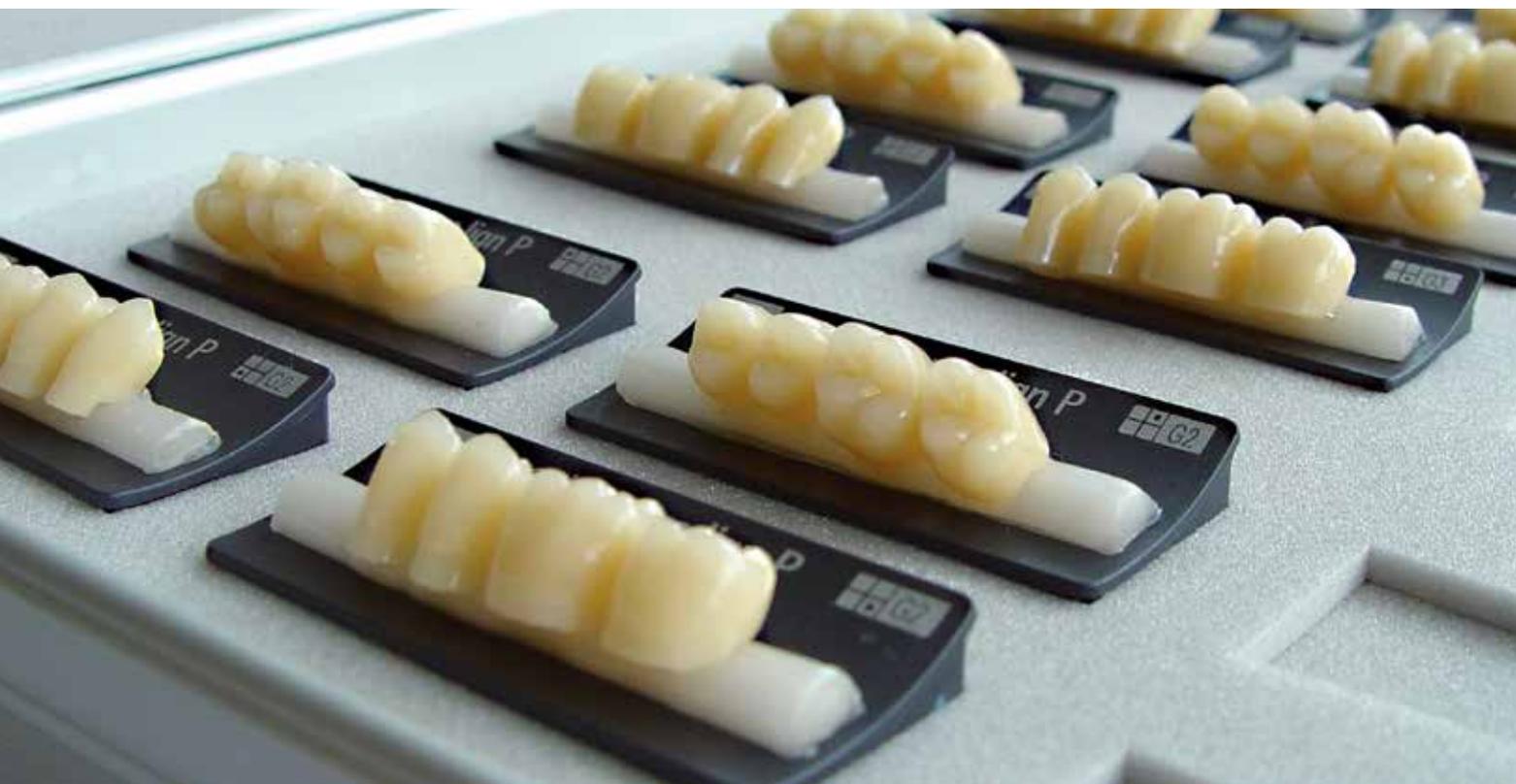

## Вининовые фасетки и цельные зубы

# «ново.лайн» novo.lign

## Вининовые фасетки

Цвета, формы и покрытия идеально подходят к цельным зубам neo.lign «нео.лайн», что обеспечивает возможность комбинирования с точным соответствием цвета и формы.



### «ново.лайн» A novo.lign A

Передняя сторона / передние зубы



толщина стенки со стороны щеки 1,0 мм

- 12 форм для верхней челюсти
- 3 формы для нижней челюсти

Передние формы также доступны в виде комплекта из 4-х или 2-х зубов



(уменьшенное изображение!)



### «ново.лайн» P novo.lign P

Задняя сторона / боковые зубы

Формы G



толщина стенки со стороны щеки 1,2 мм

- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций

Доступные размеры



маленький большой

Формы L



толщина стенки со стороны щеки 1,0 мм

- лингвализованная структура жевательной поверхности для полного протезирования

Доступные размеры



маленький большой

Формы W



толщина стенки со стороны щеки 0,8 мм

- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций
- экстра-широкая анатомическая форма, особо рекомендуемая для облицовки коронок и мостов

Доступные размеры



маленький большой

- Естественная эстетика, по примеру природы
- Передние и боковые зубы формируются путем нанесения тонких слоев ударопрочного композита ПММА (ПММА = полиметилметакрилат)
- Доступны в классических цветах шкалы A – D, A1 – D4, а также в белом цвете BL3
- Боковые зубы novo.lign «ново.лайн» позволяют реализовывать любую окклюзионную концепцию благодаря многофункциональной структуре жевательной поверхности форм G, W и L
- Экстра-широкие формы W в отличие от «узких» форм G подходят для облицовки больших каркасов коронок и мостов ...
- ... формы L с лингвализованной структурой жевательной поверхности для изготовления протезов на имплантатах для полного протезирования

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B

# «нео.лайн» neo.lign

Цельные зубы

Цвета, формы и покрытия идеально подходят к цельным зубам neo.lign «нео.лайн», что обеспечивает возможность оптимального комбинирования.



## «нео.лайн» A neo.lign A

Передняя сторона / передние зубы



- 11 форм для верхней челюсти
- 4 формы для нижней челюсти



## «нео.лайн» P neo.lign P

Задняя сторона / боковые зубы

### Формы G



- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций

Доступные размеры



маленький —————> большой

- Естественная эстетика, по примеру природы
- Передние и боковые зубы формируются путем нанесения тонких слоев ударопрочного композита ПММА (полиметилметакрилат)
- Доступны в классических цветах шкалы А – D, А1 – D4, а также в белом цвете BL3
- Боковые зубы neo.lign «нео.лайн» позволяют реализовать любую окклюзионную концепцию благодаря многофункциональной структуре жевательной поверхности форм G и L
- Специальные формы neo.lign «нео.лайн» L, имеющие «лингвализованную структуру жевательной поверхности», используются в системе visio.lign «визио.лайн» для изготовления протезов для полного протезирования

### Формы L



- лингвализованная структура жевательной поверхности для полного протезирования

Доступные размеры



маленький —————> большой

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

# «ново.лайн» novo.lign

Вининовые фасетки

## Кодировка

На все зубные планки вининовых фасеток novo.lign «ново.лайн» нанесена серебристая маркировка.

novo.lign «ново.лайн» – это наименование всех винирных фасеток в рамках облицовочной системы visio.lign® «визио.лайн»



Обзор всех форм novo.lign «ново.лайн» для верхней и нижней челюсти и таблица соотношения

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе. REF 000202RU

## novo.lign A «ново.лайн» A




A обозначает переднюю сторону, сюда относятся все формы передних зубов для верхней и нижней челюсти.

Форма зуба, например, D49

Цвет зуба, например, A3

## novo.lign P «ново.лайн» P

Формы G

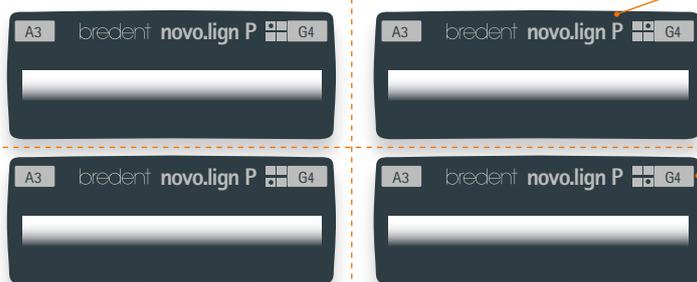


P обозначает заднюю сторону, сюда относятся все формы вининовых фасеток боковых зубов для верхней и нижней челюсти.

Варианты вининовых фасеток novo.lign «ново.лайн» P делятся на формы G, формы W и формы L.

Формы G, W и L доступны в нескольких размерах. Размеры обозначаются цифрами. Чем больше число, тем больше размер. Формы вининовых фасеток G доступны в размерах 3 и 4, формы W – в размерах 3, 4 и 5, формы L – в размерах 2 и 3.

### Формы W

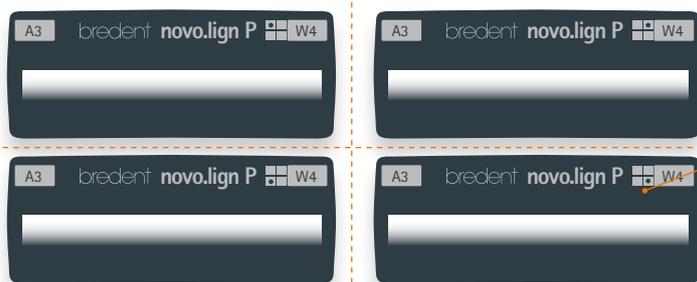

→ Таблицы размеров приведены на странице 12

Формы G и W группируются по квадрантам, это значит, что на одной зубной пластинке, к примеру, премоляры и моляры нижней челюсти 3-го квадранта имеют одну форму и размер, например, W4.

На зубных пластинках форм G, W и L все четыре квадранта изображены в виде четырех маленьких клеточек. Соответствующий квадрант обозначен точкой.

### Формы L



Формы L вининовых фасеток novo.lign «ново.лайн» P доступны в двух размерах, L2 и L3. Зубная пластинка включает в себя либо 6 боковых зубов верхней челюсти (16, 15, 14, 24, 25, 26), либо 6 боковых зубов нижней челюсти (46, 45, 44, 34, 35, 36)

# «нео.лайн» neo.lign

Цельные зубы

## Кодировка

На все зубные планки вининовых фасеток neo.lign «нео.лайн» нанесена золотистая маркировка.

neo.lign «нео.лайн» – это наименование всех цельных зубов в рамках облицовочной системы visio.lign «визио.лайн».



Обзор всех форм neo.lign «нео.лайн» для верхней и нижней челюсти и таблица соотношения

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент групп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе. REF 000329RU

## neo.lign A «нео.лайн» A




A обозначает переднюю сторону, сюда относятся все формы передних зубов для верхней и нижней челюсти.

Форма зуба, например, D48

Цвет зуба, например, B4

## neo.lign P «нео.лайн» P

Формы G

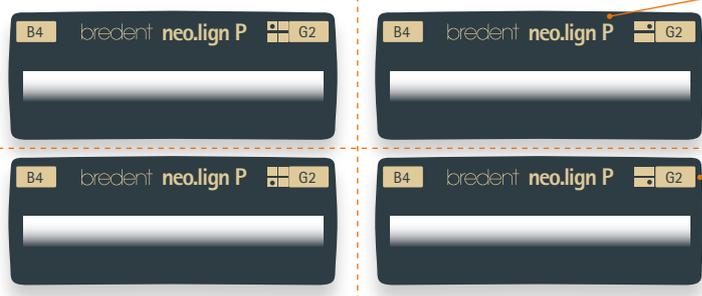

P обозначает заднюю сторону, сюда относятся все формы боковых зубов для верхней и нижней челюсти.

Варианты боковых зубов neo.lign «нео.лайн» P делятся на формы G и формы L.


Формы G и L доступны в нескольких размерах. Размеры обозначаются цифрами. Чем больше число, тем больше размер. Формы G и формы L доступны в размерах 2, 3 и 4.

→ Таблицы размеров приведены на странице 13

Формы G группируются по квадрантам, например, премоляры и моляры верхней челюсти 1-го квадранта располагаются на одной зубной пластинке.

Зубные пластинки форм L включают в себя все зубы верхней челюсти (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27) или все зубы нижней челюсти (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37) соответствующего размера. На зубных пластинках форм G и L все четыре квадранта изображены в виде четырех маленьких клеточек. Соответствующий квадрант обозначен точкой.

## Формы L

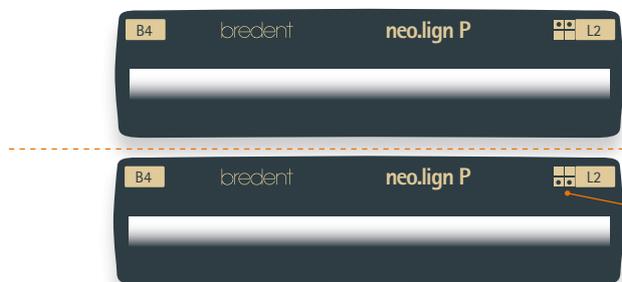

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.





Фото: Д-р Винченцо Музелла (Dr. Vincenzo Musella), Модена (Италия)

## Праймер, опакер и композитный цемент

## МКЗ Праймер



Сцепление композита с металлическими каркасами

- Титановый сплав
- Кобальт-хромовый сплав (EMF/NEM)
- Титановый сплав (алюминий/шпинельная керамика)

МКЗ Праймер предназначен для кондиционирования металлических сплавов NEM, титана, диоксида циркония, оксида алюминия и шпинельной керамики. Таким образом создается химическое сцепление с композитами, например, crea.lign «креа.лайн». Поэтому МКЗ Праймер оптимально подходит для приклеивания индивидуальных абатментов. МКЗ Праймер пригоден для применения в ротовой полости.

## Активатор МКЗ EM



Сцепление композита с каркасами из благородных металлов

- Сплавы благородных металлов (Au, Ag, Pt, Pd)
- Экологические сплавы (с пониженным содержанием благородных металлов)

Активатор МКЗ EM может использоваться для кондиционирования каркасов из благородных металлов (Au, Ag, Pt, Pd) с целью создания химического сцепления с композитами типа crea.lign «креа.лайн» только в сочетании с МКЗ Праймером, в соотношении 1:1. Активатор МКЗ EM подходит для применения в ротовой полости.

**⚠** Применяется только в сочетании с МКЗ Праймером, см. информационный блок!



Преимущества от смешивания МКЗ Праймера с активатором МКЗ EM



Преимущество самостоятельного смешивания компонентов перед применением заключается в том, что пользователь при помощи открытых флаконов может

самостоятельно создавать смесь того же состава, достигая тем самым необходимого кондиционирования.

## К Праймер



Сцепление композита с каркасами из огнеупорной керамики

- Силикатная керамика (заготовки CAD, e-max, Mark II, дисиликат лития, стеклокерамика)

К Праймер обеспечивает сцепление между облицовочной керамикой, пресс-керамикой, безметалловой керамикой e.max press, а также силикатной керамикой, например, заготовками CAD, Mark II, и композитами типа crea.lign «креа.лайн». К Праймер идеально подходит для ремонта керамических облицовочных оболочек благодаря возможности его применения в ротовой полости.

## visio.link «ВИЗИО.ЛИНК»



Сцепление композита с полимерами

- Силикатная керамика (заготовки CAD, e-max, Mark II, дисиликат лития, стеклокерамика)
- Материалы ПММА
- Высококачественный полимер (BioXS/BioHPP® «Био-Икс-Эс / Био-Эйч-Пи-Пи»)

Универсальный, пригодный для применения в ротовой полости, фотополимеризирующийся грунтовочный состав для ПММА и композитов для создания оптимального сцепления между полимерами для протезов на основе ПММА, высококачественными композитными материалами ПММА (вининовые фасетки novo.lign «ново.лайн» / цельные зубы neo.lign «нео.лайн» / искусственные зубы) и combo.lign «комбо.лайн».

## Опакер combo.lign «комбо.лайн» (и катализатор)



**i**

Катализатор для опакера  
combo.lign «комбо.лайн»

Для затвердевания не требуется фотополимеризация! Самозатвердевание достигается за счет смешивания катализатора для опакера combo.lign «комбо.лайн» с пигментной пастой для опакера combo.lign «комбо.лайн» в соотношении 1:1.

Фотополимеризирующийся и самозатвердевающий опакер, гарантирующий превосходное затвердевание. Цветовое исполнение обеспечивает возможность применения с композитным цементом combo.lign «комбо.лайн» и виниrowыми фасетками novo.lign «ново.лайн».

Проверенная в университете система сцепления,



совместимая со всеми праймерами для металлов и методами силанизации, оптимальный вариант при применении механических фиксаторов. Поставляется в цвете зубной эмали и цвете десны. В сочетании с combo.lign «комбо.лайн» это гарантирует стабильность цвета при использовании любых оттенков шкалы A-D.

→ Таблицы комбинаций цветов приведены на странице 50

## Композитный цемент combo.lign «комбо.лайн»



Фотополимеризирующийся композитный цемент двойного отверждения для надежного воспроизведения цвета и создания оптимального сцепления между виниrowыми фасетками novo.lign

«ново.лайн» и любыми каркасными материалами. Поставляется в классических цветах шкалы A-D и белом цвете BL3.

→ Классические цвета от A до D и белый цвет BL3, см. стр. 12 и 13

## Опакер crea.lign «креа.лайн»



Фотополимеризуемый опакер crea.lign «креа.лайн» обеспечивает стабильность цвета при свободном наслоении и применении виниrowых фасеток novo.lign «ново.лайн». В сочетании с МКЗ Праймером он создает основу для оптимального сцепления с металлическими и керамическими

каркасными материалами и, следовательно, для установки долговечных протезов без зазоров по краям. Всего 8 опакеров охватывают все цвета классической системы A-D. Также в ассортименте специальный лайнер для циркония и опакер цвета десны (GUM).



→ Таблицы комбинаций цветов приведены на странице 50

## Опакер crea.lign «креа.лайн» Z, лайнер для циркония



Фотополимеризирующийся лайнер для циркония представляет собой прозрачный опакер. При применении циркония после использования подходящего МКЗ Праймера необходимо

обязательно нанести лайнер для циркония для обеспечения надежного сцепления между диоксидом циркония и композитом.



⚠ При применении окрашенных циркониевых каркасов их цвет просвечивает, поэтому обычный опакер не наносится – при условии, что цвет каркаса соответствует цветам A – D!

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.





Фото: Д-р Винченцо Музелла (Dr. Vincenzo Musella), Модена (Италия)

**Композиты / облицовочные материалы, красители и моделирующая жидкость**

## Композит / облицовочный материал crea.lign «креа.лайн»

### Преимущества


- Чистая нанокерамика (без стоматологического стекла!)
- Оптимальные полировочные свойства для идеальных поверхностей
- $R_a$  0,03 мкм (= среднее арифметическое значение качества обработки / шероховатости поверхности)
- Текучесть, улучшенное покрытие – безззорный переход к винировой фасетки
- Низкая влагоемкость гарантирует механическую стабильность
- Без образования бляшек, предназначен для протезов на имплантатах
- Фотополимеризующийся композит в виде геля или пасты
- Гель в классических цветах дентина A-D, цвете резца, десны (GUM), модификатор (Modifier), прозрачный гель (Transpa), красители (Stains) и гель белого цвета BL3
- Гель в классических цветах дентина A-D и белом цвете BL3
- Фотополимеризующийся опакер crea.lign «креа.лайн» в восьми цветах зубной эмали и цвете десны для свободного наложения

- ➔ Опакер crea.lign «креа.лайн» см. на странице 19
- ➔ Принадлежности crea.lign «креа.лайн» см. со страницы 39
- ➔ Классические цвета от A до D и белый цвет BL3, см. также на стр. 12 и 13
- ➔ Таблицы комбинаций цветов приведены на странице 50

### Набор красителей visio.paint «ВИЗИО.ПЕЙНТ»

Жидкие фотополимеризующиеся красители visio.paint «визио.пейнт» (белый / синий / черный / слоновая кость / охра / черное дерево) накладываются с использованием технологии разбавления или наносятся напрямую с последующим дополнительным покрытием.

Нанесение поверхностного рисунка рекомендуется только в случае временных протезов. Накладываемый сверху слой композита сохраняет цвет. Красители visio.paint «визио.пейнт» подходят для применения со всеми распространенными ПММА и композитами.

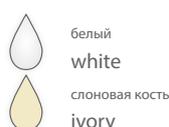

белый  
white  
слоновая кость  
ivory



синий  
blue  
охра  
ocher



черный  
black  
черное дерево  
ebony

### Моделирующая жидкость crea.lign «креа.лайн»

Моделирующая жидкость crea.lign «креа.лайн» повышает текучесть паст и гелей crea.lign «креа.лайн». При добавлении данной жидкости также снижается модуль упругости масс, что повышает эластичность масс crea.lign «креа.лайн». Помимо этого, в процессе индивидуализации зубов и десен

она обеспечивает возможность равномерного перехода от полимера для протезов к композиту crea.lign «креа.лайн». Массы crea.lign «креа.лайн» не теряют цвет и устойчивы к образованию бляшек.



⚠ При смешивании с crea.lign «креа.лайн» доля моделирующей жидкости не должна превышать 30 %.

## Гель crea.lign «креа.лайн»

Гель Enamel «Эмаль» и Incisal «режущий край»



Наряду с массами Enamel «Эмаль» (E1/E2/E3/E4) гели crea.lign Incisal «креа.лайн режущий край» (опал/синий/розовый/универсальный) предназначены для особого подчеркивания области резцов с целью придания им более молодого вида.

Гель GUM «ГАМ»



Гели crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ» (светлый/бледно-розовый/розовый/красный) предназначены для индивидуализации области десны и придания протезу более естественного вида.

Гель Transpa «Транспа»



crea.lign Transpa clear «креа.лайн Транспа клиа» – это прозрачный вариант композита crea.lign «креа.лайн», обладающий превосходными физическими свойствами для оптимального сцепления с материалом BioHPP «Био-Эйч-Пи-Пи». Светопроницающие свойства crea.lign Транспа «креа.лайн Транспа» в сочетании с красителями visio.raint «визио.пейнт» позволяют достигать высокоэстетичных характеристик прозрачности – идеальный облицовочный композит для наивысших требований.

Гель Dentin «Дентин» / Modifier «Модифаер»



Гель crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин» доступен в классических цветах дентина A-D и белом цвете BL3.



crea.lign Modifier «креа.лайн Модифаер» (бежевый/оливковый/карамель/лиловый/умбра) – это интенсивные красящие массы для выделения области шейки или имитации известковых пятен.

## Паста crea.lign «креа.лайн»

Паста Dentin «Дентин»



Паста crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин» представляет собой пастообразный вариант композита crea.lign «креа.лайн». Паста crea.lign «креа.лайн» имеет чистую нанокерамическую основу (не содержит стоматологического стекла), обладает превосходными полировочными свойствами и может без проблем применяться в сочетании с любыми другими массами crea.lign «креа.лайн».


Паста crea.lign «креа.лайн» доступна в классических цветах дентина A-D и белом цвете BL3.

## crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз»



crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз» (коричневый/оранжевый) – это фотополимеризирующиеся массы для цветовой индивидуализации композитных облицовочных элементов. Массы crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз» не требуют дополнительного покрытия и используются для выделения межзубных промежутков, краев резцов и щелей.

## Кольца с образцами цвета crea.lign «креа.лайн» / шкалы оттенков

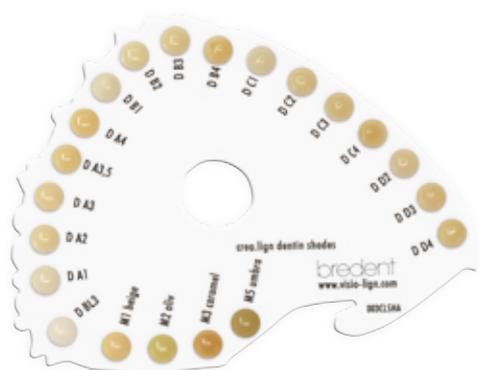

⚠ Образцы цвета не входят в комплект поставки!

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.





## Наборы

## Набор «Починка керамики» в пластмассовом кейсе

для зуботехнических лабораторий

Обратная сторона



Лицевая сторона

- Список изделий / содержимое набора для устранения сколов см. на странице 36
- Также можно приобрести пустой пластмассовый кейс! REF CLIGNSETT

## Набор «Починка керамики» в алюминиевом чемоданчике

для стоматологических кабинетов



- Список изделий / содержимое набора для устранения сколов см. на странице 36

## Актуальная карта форм в алюминиевом чемоданчике

для вининовых фасеток novo.lign «ново.лайн» и/или цельных зубов neo.lign «нео.лайн»



- Список изделий / содержимое карты структур novo.lign «ново.лайн» см. на странице 31




- Список изделий / содержимое актуальной карты форм neo.lign «нео.лайн» см. на странице 32

Алюминиевый  
чемоданчик  
Набор «Красна-белая  
эстетика»



→ Список изделий / содержимое набора «Красна-белая эстетика» см. на странице 33

Набор crea.lign freestyle «креа-лайн фристайл» в алюминиевом чемоданчике

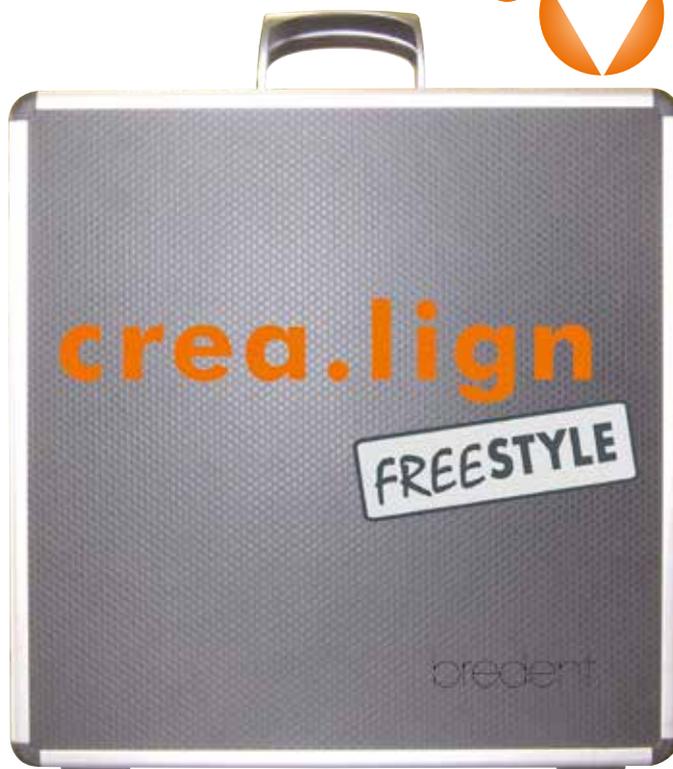


→ Список изделий, входящих в набор crea.lign «креа.лайн», см. на странице 35

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

## Наборы visio.lign® «визиолайн»

**REF VLIGNSET2**
**Набор visio.lign® «визиолайн» 2**

Шкаф/коробка для зубов visio.lign®

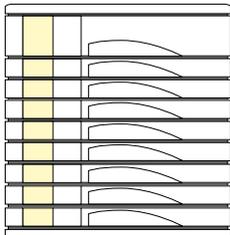

1 x

 Смесительная канюля combo.lign,  
 размер 2

1 x 10




Вининовые фасетки novo.lign A – передние зубы



10 зубных планок

планок novo.lign P – боковые зубы

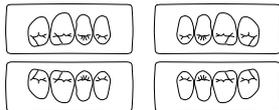

8 зубных планок

Композитный цемент combo.lign, 8 г

1 x



visio.link, 10 мл

1 x


 Ассортимент в одном цвете на выбор

 ➔ Классические цвета от A до D  
 и белый цвет BL3, см. стр. 12 и 13

Зубные планки novo.lign A и P

 Формы вининовых фасеток для передних и  
 боковых зубов на выбор

 ➔ см. **i**-блок

Зубные планки novo.lign P

 Формы вининовых фасеток для боковых  
 зубов на выбор


 ➔ Таблицы размеров см. на  
 странице 12

 Обзор всех форм novo.lign  
 «ново-лайн» для верхней и нижней  
 челюсти и таблица соотношения

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент групп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе. REF 000202RU

**REF VLIGNSET3**
**Стартовый набор visio.lign® «визиолайн» 3**


Шкаф/коробка для зубов visio.lign®

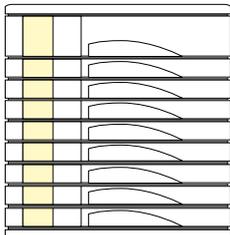

1 x

Опакер crea.lign, 4 г

1 x

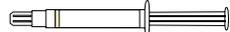
 Смесительная канюля combo.lign,  
 размер 2

1 x 10




Вининовые фасетки novo.lign A – передние зубы



13 зубных планок

Вининовые фасетки novo.lign P – боковые зубы

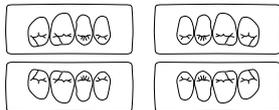

8 зубных планок

Колпачок

1 x 10



Канюля для нанесения

1 x 10



Композитный цемент combo.lign, 8 г

1 x


 Держатель для нанесения  
 геля crea.lign одной рукой

2 x



visio.link, 10 мл

1 x


 Ассортимент в одном цвете на выбор

 ➔ Классические цвета от A до D  
 и белый цвет BL3, см. страницы 12 и 13

Зубные планки novo.lign A и P

 Формы вининовых фасеток для передних и  
 боковых зубов на выбор

 ➔ см. **i**-блок

Зубные планки novo.lign P

 Формы вининовых фасеток для боковых  
 зубов на выбор

 ➔ Таблицы размеров см. на  
 странице 12

 Гель crea.lign Incisal и crea.lign Dentin в  
 цветах на выбор


➔ Цвета см. на странице 23

## Наборы visio.lign® «визио.лайн»

### REF VLIGNSET4


### Стартовый набор visio.lign® «визио.лайн» 4

Шкаф/коробка для зубов visio.lign®

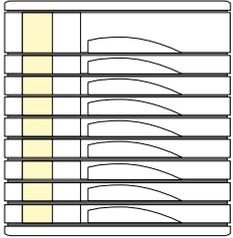

1 x

Опакер crea.lign, 4 г

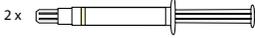


2 x

Смесительная канюля combo.lign, размер 2

1 x 10



Смесительная канюля, зеленая, размер 4

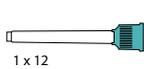

1 x 12

МКЗ Праймер, 4 мл




1 x

Вининовые фасетки novo.lign A – передние зубы



26 зубных планок

Вининовые фасетки novo.lign P – боковые зубы

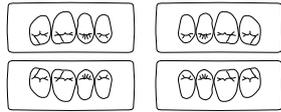

24 зубных планок


Колпачок

1 x 10

Канюля для нанесения


1 x 10

Композитный цемент combo.lign, 8 г

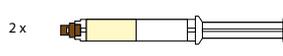

2 x

Силикон для предварительной матрицы visio.sil, 50 мл

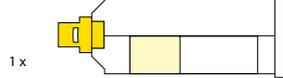


1 x

Моделирующая жидкость, 10 мл



1 x

Держатель для нанесения геля crea.lign одной рукой

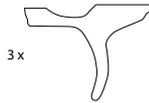

3 x

visio.link, 10 мл

1 x



Гель crea.lign, 5 г

10 x

Ассортимент в **двух** цветах на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. стр. 12 и 13

Зубные планки novo.lign A и P

Формы вининовых фасеток для передних и боковых зубов на выбор

→ см. **i**-блок

Зубные планки novo.lign P

Формы вининовых фасеток для боковых зубов на выбор

→ Таблицы размеров см. на странице 12


Гель crea.lign Incisal и crea.lign Dentin в цветах на выбор

→ Цвета см. на странице 23

### REF VLUPSETN

### Расширенный набор visio.lign® «визио.лайн» N

Опакер crea.lign, 4 г

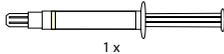

1 x

Смесительная канюля combo.lign, размер 2

1 x 10




Вининовые фасетки novo.lign A – передние зубы




13 зубных планок

Вининовые фасетки novo.lign P – боковые зубы

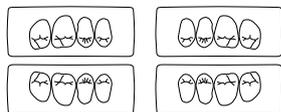

12 зубных планок

Композитный цемент combo.lign, 8 г

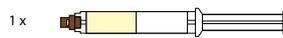

1 x

Гель crea.lign, 5 г

1x

Ассортимент в **одном** цвете на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. страницы 12 и 13

Зубные планки novo.lign A и P

Формы вининовых фасеток для передних и боковых зубов на выбор

→ см. **i**-блок

Зубные планки novo.lign P

Формы вининовых фасеток для боковых зубов на выбор

→ Таблицы размеров см. на странице 12

Гель crea.lign на выбор

→ Обзор см. на странице 23

## Наборы visio.lign® «визио.лайн»

REF VLIGNPRVC


### Наборы visio.lign® «визио.лайн» PRVC

Алюминиевый чемоданчик visio.lign®



1 x

Вининовые фасетки novo.lign A – передние зубы

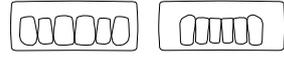1 зубная планка  
для верхней челюсти1 зубная планка  
для нижней челюсти

Вининовые фасетки novo.lign P – боковые зубы

2 зубные планки  
для верхней челюсти2 зубные планки  
для нижней челюсти

Канюля для нанесения

8 x

Смесительная канюля combo.lign,  
размер 2

1 x 10



Композитный цемент combo.lign, 8 г

1 x

МКЗ Праймер,  
4 мл

1 x




Моделирующая жидкость, 10 мл

1 x




Кольцо с образцами цвета crea.lign / шкала оттенков (заполненная)

1 x

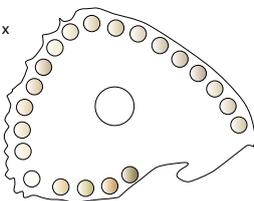

1 x

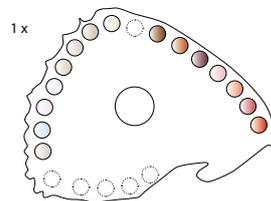Держатель для нанесения  
геля crea.lign одной рукой

1 x

visio.link, 10 мл

1 x




Гель crea.lign, 5 г

8 x

Краситель crea.lign Stain, 1,4 г

2 x

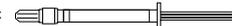

Опакер combo.lign, 4 г

1 x



Катализатор combo.lign, 4 г

1 x



Ассортимент в цвете на выбор

→ Классические цвета от А до D  
и белый цвет BL3, см. страницы 12 и 13

Зубные планки novo.lign А и Р

Формы вининовых фасеток для передних и  
боковых зубов на выбор

→ см. i-блок

Зубные планки novo.lign Р

Формы вининовых фасеток для боковых  
зубов на выбор→ Таблицы размеров см. на  
странице 12

Гель и красители crea.lign на выбор

→ Обзор см. на странице 23

Опакер combo.lign


Цвета на выбор

→ Цвета см. на странице 19

## Наборы novo.lign «ново.лайн»

### REF VLIGNPRVN

### Актуальная карта форм novo.lign «ново.лайн» А и Р

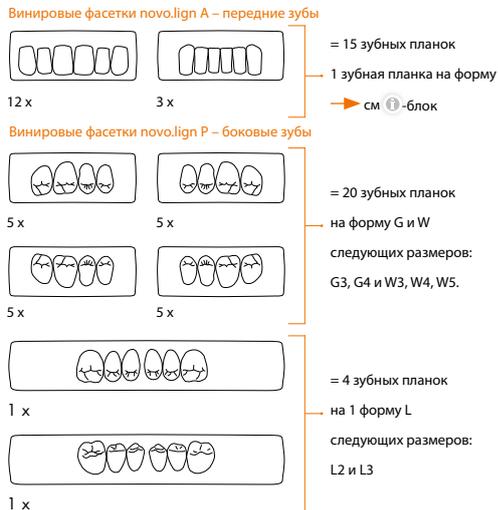

Ассортимент в **одном** цвете на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. стр. 12 и 13

Зубные планки novo.lign А и Р  
Формы вининовых фасеток для передних и боковых зубов

→ см. i-блок

Зубные планки novo.lign Р  
Формы вининовых фасеток для боковых зубов на выбор

→ Таблицы размеров см. на странице 12

### REF VLIGNSETP

### Расширенный набор novo.lign «ново.лайн» Р



Ассортимент в **двух** цветах на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. страницы 12 и 13

Зубные планки novo.lign А и Р  
на выбор (на выбор формы вининовых фасеток для боковых зубов G и/или W)

→ Таблицу размеров novo.lign Р см. на странице 12 или см. все формы novo.lign «ново.лайн» А и Р в i-блоке



Обзор всех форм novo.lign «ново.лайн» для верхней и нижней челюсти и таблица соотношения

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе. REF 000202RU

## Наборы neo.lign «нео.лайн»


**REF VLIGNPRVT**

### Актуальная карта форм neo.lign «нео.лайн» А и Р


Алюминиевый чемоданчик visio.lign®




Цельные зубы neo.lign А – передние зубы

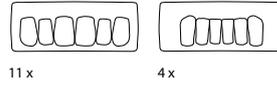
 = 15 зубных планок:  
 1 зубная планка на форму  
 → см. **i**-блок

Цельные зубы neo.lign Р – формы боковых зубов G

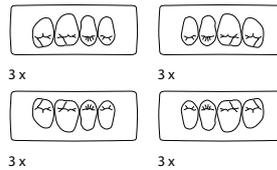
 = 12 зубных планок:  
 на 1 форму G следующих размеров:  
 G2, G3 и G4


Цельные зубы neo.lign Р – формы боковых зубов L

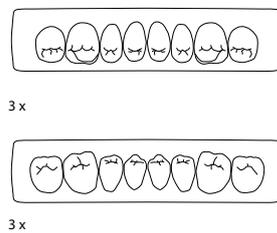
 = 6 зубных планок:  
 на 1 форму L  
 следующих размеров:  
 L2, L3 и L4


**REF NL28for28**

### Набор из 28-х зубов neo.lign «нео.лайн» (только для Германии и лишь 1 на клиента!)

Цельные зубы neo.lign А – передние зубы

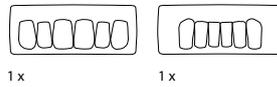
 = 2 зубные планки:  
 формы передних зубов на выбор  
 → см. **i**-блок


Цельные зубы neo.lign Р – формы боковых зубов L

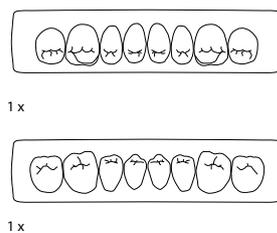
 = 2 зубные планки:  
 боковые зубы на 1 x в форме L  
 в следующих размерах на выбор:  
 L2 / L3 / L4

**REF NLUPSET2**


### Расширенный набор neo.lign «нео.лайн» А и Р

Цельные зубы neo.lign А – передние зубы

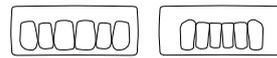


= 12 зубных планок

Цельные зубы neo.lign Р – формы боковых зубов G

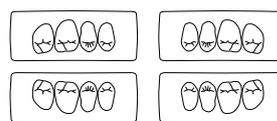

= 12 зубных планок

Цельные зубы neo.lign Р – формы боковых зубов L

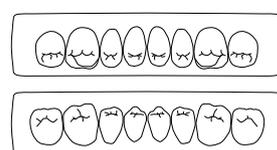

Обзор всех форм neo.lign «нео.лайн» для верхней и нижней челюсти и таблица соотношения

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе. REF 000329RU

Ассортимент в цвете на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. страницы 12 и 13

Зубные планки neo.lign А и Р

Формы цельных передних и боковых зубов на выбор

 → см. **i**-блок

Зубные планки neo.lign Р

Формы цельных боковых зубов

→ Таблицы размеров см. на странице 13

 Ассортимент в одном цвете на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. стр. 12 и 13

Зубные планки neo.lign Р

Формы цельных боковых зубов

→ Таблицы размеров см. на странице 13

Ассортимент в цвете на выбор

→ Классические цвета от А до D и белый цвет BL3, см. страницы 12 и 13

Зубные планки neo.lign А и Р

Формы цельных передних и боковых зубов на выбор

 → см. **i**-блок

Зубные планки neo.lign Р

Формы цельных боковых зубов


→ Таблицы размеров см. на странице 13



## Наборы crea.lign «креа.лайн»

**REF CLIGNSETFN**

### Набор crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл» FN

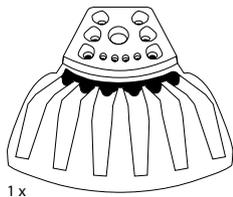 Подставка для шприцев crea.lign  
 пластмасса


1 x

Моделирующая жидкость,

10 мл

1 x



Колпачок

2 x 10



Канюля для нанесения

2 x 10


 Держатель для нанесения  
 геля crea.lign одной рукой


9 x

 Гель crea.lign Incisal и  
 crea.lign Modifier

Цвета на выбор

→ см. стр. 23

Гель crea.lign Incisal, 5 г

6 x



Гель crea.lign Modifier, 5 г

2 x




Гель crea.lign Dentin, 5 г

17 x



Краситель crea.lign Stain, 1,4 г

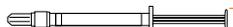

оранжевый

1 x S1 orange

коричневый

1 x S2 brown

Опакер crea.lign, 4 г



1 x цвет 1

1 x цвет 4

1 x цвет 7

1 x цвет 2

1 x цвет 5

1 x цвет 8

1 x цвет 3

1 x цвет 6

1 x GUM

Опакер crea.lign

Таблица соотношения цветов

→ см. стр. 50

**REF CLPNSSET7**

### Стартовый набор crea.lign «креа.лайн», паста 7 цветов

 1 x A2  
 1 x A3  
 1 x A3,5

 1 x B2  
 1 x B3  
 1 x C3  
 1 x D3

Паста crea.lign Dentin, 3 г



Поворотный клапан



7 x

Информация о пасте crea.lign

→ см. стр. 23

### Тестовый набор crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл»

**REF CLFKSETA20**

A2

или

**REF CLFKSETA30**

A3

или

**REF CLFKSETA35**

A3,5

1 x Гель crea.lign Dentin, 5 г



1 x Паста crea.lign Dentin, 3 г



1 x Гель crea.lign Incisal, 5 г



1 x Опакер crea.lign, 4 г


 Набор включает в себя гель crea.lign Incisal и  
 opakер crea.lign в выбранном из доступных  
 оттенков цвета (A2, A3 и A3.5).

## Наборы crea.lign «креа.лайн»

REF CLIGNSETFK


### Наборы crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл»

Алюминиевый чемоданчик,  
ширина 42,5 см х высота 43,5 см х глубина 20,5 см



1 x

Подставка для шприцев crea.lign,  
нержавеющая сталь

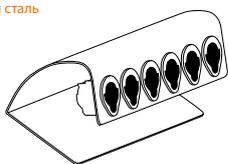

2 x

Держатель для нанесения геля  
crea.lign одной рукой



12 x

Комплект visio.paint,


3 мл



1 x 6

Информационная папка visio.lign,

содержащая различные печатные материалы, например, руководство по применению crea.lign Freestyle «креа.лайн Фристайл» и настольный держатель с иллюстрированным руководством по нанесению.

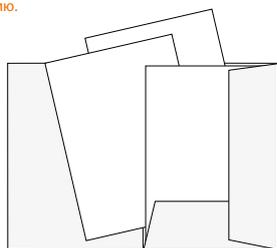

1 x

Моделирующая жидкость,

10 мл



1 x

visio.link,

10 мл



1 x

Одноразовая чашка



1 x 12

Блок для замешивания,  
маленький




2 x

Одноразовая кисточка



20 x

Паста crea.lign Dentin, 3 г

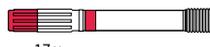

17 x

Колпачок

2 x 10



Канюля для нанесения

2 x 10



Краситель crea.lign Stain, 1,4 г

2 x



Опакер crea.lign, 4 г

10 x



MKZ Праймер,

4 мл



1 x

Активатор MKZ EM,

4 мл



1 x

K Праймер,

3 мл



1 x

Шпатель




1 x

Держатель кисточки



1 x

Поворотный клапан

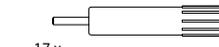

17 x

Гель crea.lign Incisal, 5 г

8 x



Гель crea.lign Transpa clear, 5 г

1 x



Гель crea.lign Dentin, 5 г

17 x



Гель crea.lign Modifier, 5 г

5 x



Гель crea.lign GUM, 5 г

4 x



Ассортимент включает следующие компоненты  
во всех доступных цветах:


- опакер crea.lign «креа.лайн»
  - паста crea.lign «креа.лайн»
    - Dentin (в наличии только цвет Dentin «Дентин»!)
  - гель crea.lign «креа.лайн»
    - Incisal «режущий край»
    - Transpa clear «Транспа клиа»
    - Dentin «Дентин»
    - Modifier «Модифаер»
    - GUM «ГАМ»
  - crea.lign Stain «креа.лайн Стэйн»
  - visio.paint «визио.пейнт»
- см. стр. 19, 22 и 23

Праймер и активатор

→ см. стр. 18


Кольцо с образцами цвета crea.lign,  
оттенки дентина, (незаполненное)

1 x

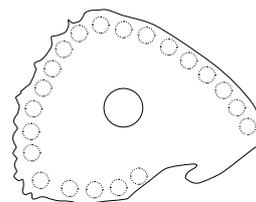

Кольцо образцами цвета crea.lign Incisal,  
crea.lign Stains и crea.lign GUM, (незаполненное)

1 x

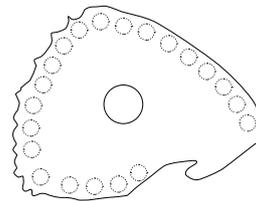


Изображения не соответствуют масштабу.  
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

## Наборы crea.lign «креа.лайн»

**REF CLIGNSETFH**

### Набор crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл» FH


Подставка для шприцев  
crea.lign «креа.лайн»,  
нержавеющая сталь

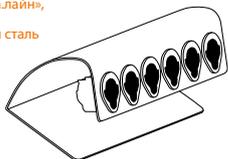

1 x


Колпачок  
2 x 10

Опакер crea.lign, 4 г

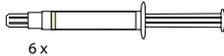

6 x

Паста crea.lign Dentin, 3 г

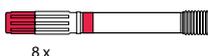

8 x

Канюля для нанесения



2 x 10

Держатель для нанесения  
геля crea.lign одной рукой



8 x

Поворотный клапан



8 x

Опакер crea.lign  
Цвета на выбор

→ см. стр. 19

Паста и гель crea.lign  
Цвета на выбор

→ см. стр. 23

Гель crea.lign Incisal, 5 г



6 x

Гель crea.lign Modifier, 5 г



2 x

**REF CLIGNSETA**

### Набор «Починка керамики», для стоматологов

Алюминиевый чемоданчик



1 x

MKZ Праймер,  
4 мл



1 x

Активатор MKZ EM,  
4 мл




1 x

К Праймер,  
3 мл



1 x

Вкладыш с инструкцией по обработке

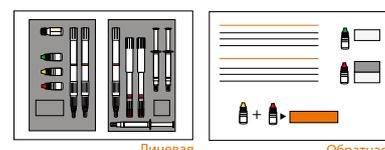

1 x

Лицевая

Обратная

1 x A2  
1 x A3

Паста crea.lign Dentin 3 г



Поворотный клапан



8 x

Одноразовая чашка

1 x 12



Колпачок

1 x 10

Канюля для нанесения



1 x 10

Гель crea.lign Incisal, 5 г



1 x E1

Опакер crea.lign, 4 г



1 x цвет 2  
1 x цвет 3

visio.link,

10 мл



1 x

Гель crea.lign Dentin, 5 г



1 x A2  
1 x A3

Опакер crea.lign Z,  
лайнер для циркония, 4 г



1 x

**REF CLIGNSETT1**

### Набор «Починка керамики», для зубных техников

Пластмассовый кейс



1 x

MKZ Праймер,  
4 мл



1 x

Активатор MKZ EM,  
4 мл




1 x

К Праймер,  
3 мл



1 x

Обзор праймеров – показания и применение

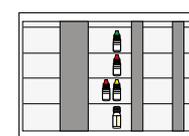

1 x

visio.link,

10 мл



1 x

Одноразовая чашка




1 x 12


## Наборы опакеров

### REF OLIGNSET1 Набор опакеров combo.lign «комболайн»

Катализатор combo.lign, 4 г

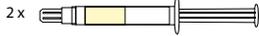

Опакер combo.lign, 4 г

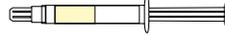

- 1 x light, ветлый
- 1 x medium, средний
- 1 x intensiv, интенсивный
- 1 x GUM (десна)

Опакер combo.lign и катализатор

→ см. стр. 19

**i**

Написание «Оракер» используется преднамеренно – это не ошибка!

В немецком варианте написание «Оракер» в противоположность «Оракер» в рамках системы visio.lign «визио.лайн» дополнительно акцентирует внимание на различии между опакерами crealign «креа.лайн» и combo.lign «комбо.лайн».

### REF CLFHOPSET Набор опакеров crealign «креа.лайн»

Опакер crealign, 4 г



- 1 x цвет 1
- 1 x цвет 2
- 1 x цвет 3
- 1 x цвет 4
- 1 x цвет 5
- 1 x цвет 6
- 1 x цвет 7
- 1 x цвет 8
- 1 x GUM (десна)

Опакер crealign

→ см. стр. 19

## Набор красителей visio.paint «визио.пейнт»

Одноразовая кисточка

6 x



Держатель кисточки

1 x



visio.paint,

3 мл



- 1 x white, белый
- 1 x blue, синий
- 1 x black, черный
- 1 x ivory, слоновая кость
- 1 x ochre, охра
- 1 x ebony, черное дерево

visio.paint

→ см. стр. 22

Блок для замешивания,

1 x



REF 54001250

## Набор инструментов для обработки композитов visio.lign® «визио.лайн»

→ см. стр. 41

REF VLTOOLKIT

Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.





## Аппараты, инструменты и принадлежности

## bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит»



Многофункциональная система полимеризации для зубоорачебных кабинетов и лабораторий.

Для обработки облицовочных и стоматологических материалов раньше требовалось большее количество аппаратов. Благодаря bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит» обработку всех распространенных материалов впервые можно производить при помощи одного концептуального аппарата.

Совокупная энергия светодиодов

bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит» – это светодиодное устройство для фотополлимеризации, оснащенное 21 светодиодом с диапазоном длины волн от 370 до 500 нм. Срок службы светодиодов составляет около 20 000 часов.

Диапазон мощности переносной лампы bre.Lux LED N «бре.Люкс ЛЕД Эн» (со спиральным проводом) составляет 370 – 500 нм.

Преимущества bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит»

- Фиксация/отверждение/промежуточная полимеризация и окончательное отверждение непосредственно на рабочем месте при помощи одного аппарата
- Длина волны в 370–500 нм покрывает необходимый диапазон, том числе и для переносной лампы
- Ограничение мощности и восстановление усиливают свойства стоматологических материалов и позволяют достигать максимального результата
- Простота комбинирования задержки запуска со временем полимеризации
- Большой объем для 2 моделей, с оптимальным и равномерным освещением
- Гибкий шланг с зажимным кольцом для переносной лампы служит «третьей рукой» и позволяет выполнять работы, требующие задействования обеих рук

➔ Пример применения переносной лампы приведен на странице 39

➔ Время полимеризации при использовании bre.Lux «бре.Люкс» см. на странице 49

## Набор инструментов visio.lign® «визио.лайн»



### «Finishing Touch» «Финишн Тач»

Набор инструментов visio.lign «визио.лайн» оптимально подходит для обработки композитов, например, облицовки visio.lign «визио.лайн», и включает в себя инструменты и полировочные пасты для идеальной финишной обработки.

### Поверхности композитов, не уступающие керамике

Результатом обработки материалов системы visio.lign «визио.лайн» инструментами visio.lign «визио.лайн» становятся устойчивые к образованию бляшек и не теряющие цвет поверхности, которые ничем не уступают керамике с точки зрения качества и прочности.

### Преимущества набора инструментов visio.lign® «визио.лайн»

- Фрезы с затылочным шлифованием гарантируют гладкую поверхность и снижают затраты на полировку
- VB набор входят пасты для предварительной и глянцевой полировки
- Различная высота расположения инструментов для удобного захвата
- Съемная стеклянная банка, предотвращающая высыхание полировочной пасты
- Напечатанные пиктограммы и номера заказа для лучшей наглядности
- Три свободных места для дополнительных инструментов

Изображения не соответствуют масштабу.  
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

## Инструменты и расходные материалы

### Подставка для шприцев crea.lign «креа.лайн», нержавеющая сталь



Подставка для шприцев из нержавеющей стали с пластмассовой направляющей, вмещает до 6 шприцев crea.lign «креа.лайн».

### Одноразовая кисточка



Одноразовая кисточка для установки в держатель кисточек.

### Шпатель



Шпатель предназначен для замешивания и грубого нанесения материалов.

### Блок для замешивания, большой



100 мм x 100 мм  
100 листов

### Подставка для шприцев crea.lign «креа.лайн», пластмасса



В подставку для шприцев crea.lign «креа.лайн» можно установить до 12 шприцев crea.lign «креа.лайн» с ручкой.

### Держатель кисточки



Держатели для кисточек предназначены для установки одноразовой кисточки.

### Одноразовая чашка



Размером с палец, небольшого объема, предназначена для экономного дозирования праймеров visio.lign «визио.лайн» (MKZ Праймер, К Праймер, активатор MKZ EM и visio.link «визио.линк»).

### Блок для замешивания, маленький



50 мм x 35 мм  
100 листов

## Инструменты и расходные материалы



### Поворотный клапан для пасты crea.lign «креа.лайн»

Поворотный клапан для простого и точного нанесения любых паст crea.lign «креа.лайн»



### Держатель для точечного нанесения геля crea.lign «креа.лайн»

Держатель, позволяющая просто и точно наносить гель из любых шприцев для геля crea.lign «креа.лайн» на 5 г.



### Канюли для нанесения

Непрозрачная канюля для нанесения, подходящая для применения со всеми шприцами crea.lign «креа.лайн» на 5 г.



### Колпачок

Непрозрачный защитный колпачок, подходит для всех канюль для нанесения



### Thermo-Pen «Термо Пэн»

Thermo-Pen «Термо Пэн» – это устройство для обдувки горячим воздухом с пьезо-механизмом без открытого пламени. Оно позволяет разогревать вининовые фасетки без риска их пережигания. Для изменения формы вининовых фасеток требуется темпе-

ратура прилб. 250 °С. Растяжение позволяет более эффективно наносить облицовку, к примеру, на телескопические коронки.



Мы рекомендуем использовать устройство Thermo-Pen «Термо Пэн» для термопластического изменения формы

1. Разогревание облицовочной оболочки



2. Загибание горячей облицовочной оболочки



Держатель и канюля для нанесения из шприца геля crea.lign «креа.лайн»

Держатель разработан специально для шприцев для геля crea.lign «креа.лайн» и в сочетании с канюлей для нанесения обеспечивает возможность точной дозировки одной рукой. Благодаря держателю шприц аккуратно лежит в ладони, а дозировка жидкого геля осуществляется путем поворачивания рифленого поворотного механизма большим или указательным пальцем той же руки. При этом второй рукой можно выполнять другие действия, например, держать обрабатываемые объекты.



Изображения не соответствуют масштабу. Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

## Инструменты и расходные материалы



### Диспенсер для композитного цемента combo.lign «комболайн»

Дозирующее устройство для всех картриджей combo.lign «комболайн» для простого и точного распределения композитного цемента combo.lign «комболайн».

**⚠** Картридж не входит в комплект поставки!



### Смесительные канюли для композитного цемента combo.lign «комболайн»

Непрозрачная смесительная канюля для всех композитных цементов combo.lign «комболайн»



### Диспенсер для силиконов visio.sil «визио.сил»

Дозирующее устройство для картриджей visio.sil «визио.сил», visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти» и visio.sil fix «визио.сил фикс» для простого и точного распределения силикона.

**⚠** Картридж не входит в комплект поставки!



### Смесительные канюли для силикона visio.sil fix «визио.сил фикс», размер 1

Смесительная канюля для высококачественного силикона для предварительной матрицы.



### Смесительные канюли для силиконов visio.sil «визио.сил» и visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти», размер 4

Смесительные канюли для прозрачных силиконов visio.sil «визио.сил».

## Шкаф для хранения зубов visio.lign® «визио.лайн»



### Вкладки в выдвижные ящики для



6 шприцев для опакера  
combo.lign «комбо.лайн»



9 шприцев для опакера crea.lign «креа.лайн»  
и/или, пасты crea.lign «креа.лайн»



24 зубных пластинки novo.lign «ново.лайн» P  
и/или neo.lign «нео.лайн» P



36 зубных пластинок  
novo.lign «ново.лайн» A и/или  
neo.lign «нео.лайн» A




10 шприцев для геля  
crea.lign «креа.лайн»  
3 держателя



8 шприцев для геля crea.lign  
«креа.лайн» и/или  
пасты crea.lign «креа.лайн»  
2 флакона жидкости для сцепления  
1 картридж с силиконом

Изображения не соответствуют масштабу.  
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.



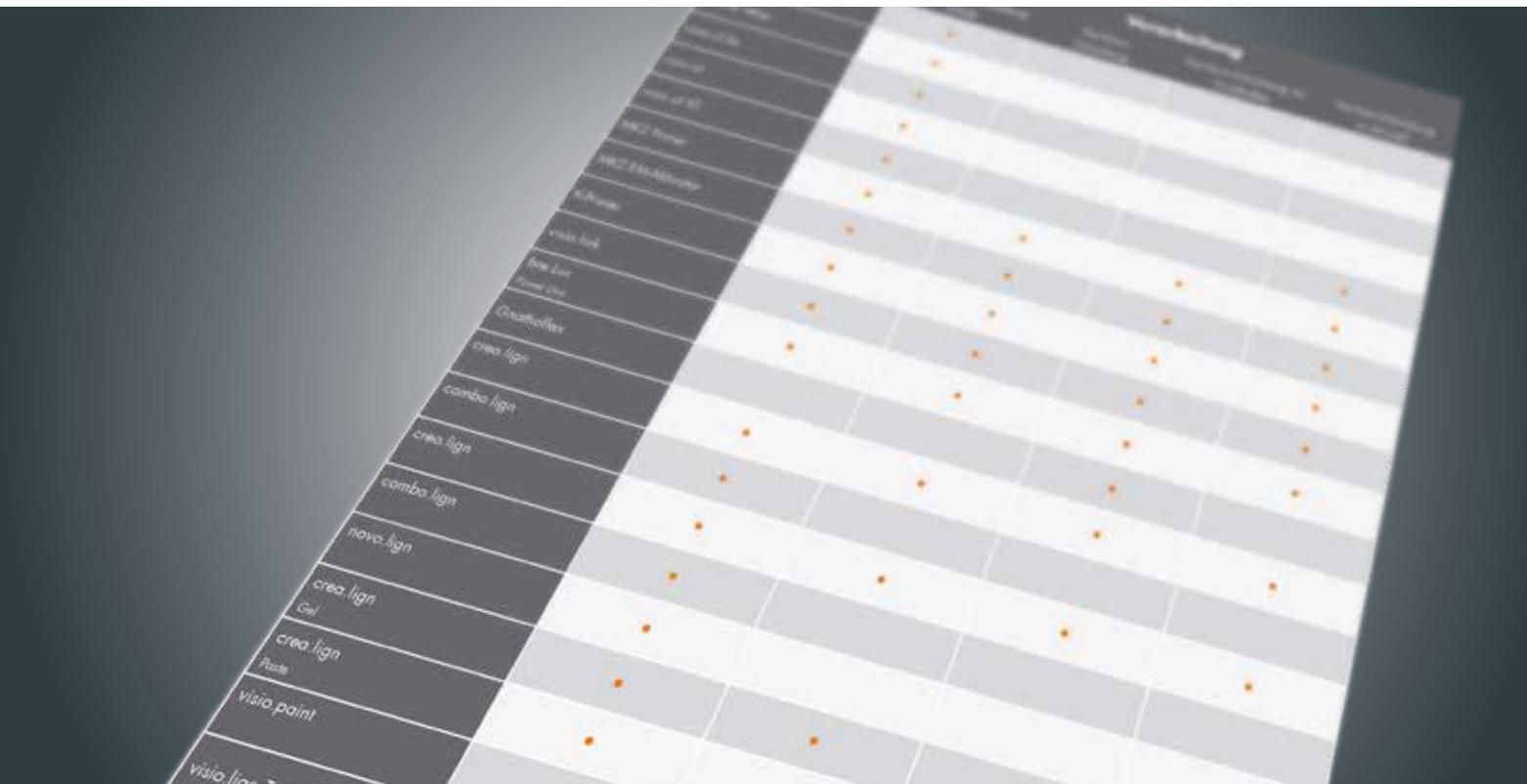

## Таблицы схем и комбинаций

## Схема для обработки материалов

Материал	Обработка			
	Облицовка с помощью вининовых фасеток	Свободное наслоение	Свободное наслоение с помощью форм Gnathoflex «Гнатофлекс»	Свободное наслоение в предварительной матрице
beauty setup «бьюти.сетап»	•			
visio.sil fix «визио.сил фикс»	•			
visio.sil «визио.сил»	•			
visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти»	•			•
MKZ Праймер	•	•	•	•
Активатор MKZ EM	•	•	•	•
К Праймер	•	•	•	•
visio.link «визио.линк»	•	•	•	•
bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит»	•	•	•	•
Gnathoflex «Гнатофлекс»			•	
Моделирующая жидкость crea.lign «креа.лайн»	•	•	•	•
Опакер combo.lign «комбо.лайн»	•			
Опакер crea.lign «креа.лайн»	•	•	•	•
Композитный цемент combo.lign «комбо.лайн»	•			
Вининовые фасетки novo.lign «ново.лайн»	•			
Гель crea.lign «креа.лайн»	•	•	•	•
Паста crea.lign «креа.лайн»	•	•	•	•
Красители visio.paint «визио.пейнт»	•	•	•	•
Набор инструментов visio.lign «визио.лайн»	•	•	•	•

## Время полимеризации при использовании bre.Lux «бре.Люкс» для компонентов системы visio.lign® «визио.лайн»

Изготовитель	Продукт	bre.Lux LED N «бре.Люкс ЛЕД Эн» (переносная лампа)		bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит» (стационарное устройство)		
		Окончательная полимеризация	Фиксация/затвердевание	Промежуточная полимеризация	Окончательная полимеризация	Загустение/восстановление
bredent	visio.link «визио.линк»	30 с	-	-	90 с	40 x (50%)
bredent	Композитный цемент combo.lign «комбо.лайн»	X	15 с	120 с	180 с	-
bredent	Гель crea.lign «креа.лайн»	X	15 с	180 с	360 с	20 x (50%)
bredent	Паста crea.lign «креа.лайн»	X	15 с	180 с	360 с	-
bredent	Опакер combo.lign «комбо.лайн»	X	15 с	180 с	180 с	-
bredent	visio.paint «визио.пейнт»	-	30 с	180 с	360 с	-
bredent	crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз»	-	40 с	90 с	90 с	-
bredent	crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз»	-	30 с	90 с	90 с	-

180 s время полимеризации  
 - не предусмотрено  
 X противопоказание

## Аппараты и время фотополимеризации

для компонентов системы visio.lign® «визио.лайн» visio.link «визио.линк», combo.lign «комбо.лайн» и crea.lign «креа.лайн»

Изготовитель	Аппарат	Длина волны в нм*	Время полимеризации visio.link «визио.линк»	Время полимеризации combo.lign «комбо.лайн»	Время полимеризации геля crea.lign «креа.лайн» Опакер combo.lign «комбо.лайн» Опакер crea.lign «креа.лайн»
bredent	bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит»	370 - 500	90 с	180 с	6 мин
Dentsply / Degudent	Triat, Triat 2000 Eclipse	400 - 500 неизвестно	3 мин 60 с	6 мин 180 с	10 мин 6 мин
Heraeus Kulzer	Dentacolor XS, Uni XS Heraflash	320 - 520 320 - 520	90 с 90 с	180 с 180 с	6 мин 6 мин
GC	Labolight LV-III	380 - 490	2 мин	5 мин	10 мин
Ivoclar Vivadent	Targas Power Ofen Lumanat 100	400 - 580 400 - 580	4 мин 4 мин	180 с 180 с	8 мин 6 мин
Schütz Dental	Spektra 2000	310 - 500	2 мин	180 с	6 мин
Shofu Dental	Solitilte EX	400 - 550	90 с	180 с	6 мин
Kuraray Dental	CS 110	неизвестно	2 мин	5 мин	8 мин
Hager & Werken	Speed Labolight	320 - 550	90 с	180 с	8 мин
3M ESPE	Visio BETA (новая P1 - P4)	400 - 500	< 4 мин (P2)	7 мин (P2)	15 мин (P1)
	Visio BETA (старая U0 - U3)**	400 - 500	7 мин (U1, U3)	15 мин (U0)	15 мин (U0)

\* данные изготовителя

\*\* Рекомендуется использовать комплект новых ламп

## Таблицы комбинаций цветов

### Опакер crea.lign «креа.лайн»

	Цвета системы опакеров crea.lign «креа.лайн»								
	цвет 1	цвет 2	цвет 3	цвет 4	цвет 5	цвет 6	цвет 7	цвет 8	GUM (десна)
<b>Классические цвета A – D</b>	A1 / B2	A2	A3 / D3	B1 / C1 / BL3	C2 - C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	-

### Опакер combo.lign «комбо.лайн»

	Цвета системы опакеров combo.lign «комбо.лайн»			
	light (светлый)	medium (средний)	intensiv (интенсивный)	GUM (десна)
<b>Классические цвета A – D</b>	A1 - A3 / B1 - B2 / C1 - C2	A3.5 / B3 - B4 / D2 - D3	A4 / C3 - C4 / D4	-

### crea.lign «креа.лайн» от оттенка дентина (Dentin) к эмали (Enamel)

	Цвета системы гелей crea.lign Enamel «креа.лайн эмаль»			
	E1	E2	E3	E4
<b>Гель и паста crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин»</b>				
BL3*	-	-	-	-
<b>Классические цвета A – D</b>				
A1	•			
A2		•		
A3		•		
A3.5			•	
A4				•
B1	•			
B2		•		
B3			•	
B4			•	
C1	•			
C2			•	
C3			•	
C4				•
D2	•			
D3			•	
D4			•	

\* Белый цвет BL3 хорошо сочетается с гелем crea.lign Incisal Universal «креа.лайн Инсайзл Универсал»

« В И З И О . Л А Й Н »

**visio.lign®**  
Облицовочная система

Бланки заказа и более подробную  
информацию об облицовочной си-  
стеме visio.lign® «визио.лайн» можно  
найти на сайте [www.visio-lign.com](http://www.visio-lign.com).

**«Все, что противоречит природе,  
не может быть постоянным».**

*- Чарльз Дарвин (Charles Darwin) -*

[www.visio-lign.com](http://www.visio-lign.com)

bre<sup>dent</sup>

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал **bre<sup>dent</sup> group** или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.  
bre<sup>dent</sup> GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44  
[www.bre<sup>dent</sup>.com](http://www.bre<sup>dent</sup>.com) · @: [info@bre<sup>dent</sup>.com](mailto:info@bre<sup>dent</sup>.com)

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений 009504RU-20151109



1 Вининовые фасетки novo.lign «ново.лайн»

из 8

novo.lign «ново.лайн» A  
anterior / передняя сторона  
Верхняя челюсть

Цвета (классическая шкала цветов A-D)

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Форма Содержимое

Пожалуйста, укажите количество для заказа.

<b>C43</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	REF VOC43...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOC43...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOC43...5
<b>A44</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOA44...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOA44...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOA44...5
<b>F44</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOF44...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOF44...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOF44...5
<b>I45</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOI45...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOI45...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOI45...5
<b>H46</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOH46...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOH46...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOH46...5
<b>S46</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOS46...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOS46...4
	Комплект из 6-х зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOS46...5
<b>I47</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOI47...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOI47...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOI47...5
<b>D48</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOD48...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOD48...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOD48...5
<b>M48</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOM48...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOM48...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOM48...5
<b>D49</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOD49...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOD49...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOD49...5
<b>B51</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOB51...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOB51...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOB51...5
<b>K53</b>	Комплект из 2-х зубов (13,23)																	VOK53...3
	Комплект из 4-х зубов (12,11,21,22)																	VOK53...4
	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																	VOK53...5

Нижняя челюсть

Форма Содержимое

Пожалуйста, укажите количество для заказа.

<b>T35</b>	Комплект из 2-х зубов (43,33)																	VUT35...3
	Комплект из 4-х зубов (42,41,31,32)																	VUT35...4
	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																	VUT35...5
<b>D38</b>	Комплект из 2-х зубов (43,33)																	VUD38...3
	Комплект из 4-х зубов (42,41,31,32)																	VUD38...4
	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																	VUD38...5
<b>D41</b>	Комплект из 2-х зубов (43,33)																	VUD41...3
	Комплект из 4-х зубов (42,41,31,32)																	VUD41...4
	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																	VUD41...5

novo.lign «ново.лайн» P для задней стороны, формы G, W и L → см. на листе

2

Отправитель (печать)

№ клиента

Дата, подпись

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

Поставка предположительно возможна с июня 2015 года.

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

2 Вининовые фасетки novo.lign «ново.лайн»

из 8

novo.lign «ново.лайн» P posterior / задняя сторона		Цвета (классическая шкала цветов A-D)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Многофункциональные		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
<b>G3</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
1 G3	1-й квадрант (14, 15, 16, 17)																	
2 G3	2-й квадрант (24, 25, 26, 27)																	
3 G3	3-й квадрант (34, 35, 36, 37)																	
4 G3	4-й квадрант (44, 45, 46, 47)																	
<b>G4</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
1 G4	1-й квадрант (14, 15, 16, 17)																	
2 G4	2-й квадрант (24, 25, 26, 27)																	
3 G4	3-й квадрант (34, 35, 36, 37)																	
4 G4	4-й квадрант (44, 45, 46, 47)																	

REF  
V01G3...  
V02G3...  
VU3G3...  
VU4G3...  
V01G4...  
V02G4...  
VU3G4...  
VU4G4...

novo.lign «ново.лайн» P posterior / задняя сторона		Цвета (классическая шкала цветов A-D)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Техника для обработки коронок и мостов		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
<b>W3</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
1 W3	1-й квадрант (14, 15, 16, 17)																	
2 W3	2-й квадрант (24, 25, 26, 27)																	
3 W3	3-й квадрант (34, 35, 36, 37)																	
4 W3	4-й квадрант (44, 45, 46, 47)																	
<b>W4</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
1 W4	1-й квадрант (14, 15, 16, 17)																	
2 W4	2-й квадрант (24, 25, 26, 27)																	
3 W4	3-й квадрант (34, 35, 36, 37)																	
4 W4	4-й квадрант (44, 45, 46, 47)																	
<b>W5</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
1 W5	1-й квадрант (14, 15, 16, 17)																	
2 W5	2-й квадрант (24, 25, 26, 27)																	
3 W5	3-й квадрант (34, 35, 36, 37)																	
4 W5	4-й квадрант (44, 45, 46, 47)																	

REF  
V01W3...  
V02W3...  
VU3W3...  
VU4W3...  
V01W4...  
V02W4...  
VU3W4...  
VU4W4...  
V01W5...  
V02W5...  
VU3W5...  
VU4W5...

novo.lign «ново.лайн» P posterior / задняя сторона		Цвета (классическая шкала цветов A-D)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4			
Полное протезирование		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40			
Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
<b>L2</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
Верхняя челюсть	Комплект из 6-ти зубов (16, 15, 14, 24, 25, 26)																	
Нижняя челюсть	Комплект из 6-ти зубов (46, 45, 44, 34, 35, 36)																	
<b>L3</b>		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																
Верхняя челюсть	Комплект из 6-ти зубов (16, 15, 14, 24, 25, 26)																	
Нижняя челюсть	Комплект из 6-ти зубов (46, 45, 44, 34, 35, 36)																	

REF  
V0W12...  
VUW12...  
V0W13...  
VUW13...

Поставка предположительно возможна с июня 2015 года.

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

Отправитель (печать)

№ клиента  
Дата, подпись

3 Цельные зубы neo.lign «нео.лайн»

из 8

neo.lign «нео.лайн» А		Цвета (классическая шкала цветов А-D)																
anterior / передняя сторона		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Верхняя челюсть		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																	
<b>C43</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>A44</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>F44</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>I45</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>H46</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>S46</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>I47</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>D48</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>M48</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>D49</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		
<b>B51</b>	Комплект из 6-ти зубов (13,12,11,21,22,23)																		

Нижняя челюсть		Цвета (классическая шкала цветов А-D)																
anterior / передняя сторона		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Верхняя челюсть		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																	
<b>T33</b>	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																		
<b>T35</b>	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																		
<b>D38</b>	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																		
<b>D41</b>	Комплект из 6-ти зубов (43,42,41,31,32,33)																		

neo.lign «нео.лайн» Р		Цвета (классическая шкала цветов А-D)																
posterior / задняя сторона		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Многофункциональные		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																	
<b>G2</b>																			
1 G2	<b>1-й квадрант</b> (14, 15, 16, 17)																		
2 G2	<b>2-й квадрант</b> (24, 25, 26, 27)																		
3 G2	<b>3-й квадрант</b> (34, 35, 36, 37)																		
4 G2	<b>4-й квадрант</b> (44, 45, 46, 47)																		
<b>G3</b>																			
1 G3	<b>1-й квадрант</b> (14, 15, 16, 17)																		
2 G3	<b>2-й квадрант</b> (24, 25, 26, 27)																		
3 G3	<b>3-й квадрант</b> (34, 35, 36, 37)																		
4 G3	<b>4-й квадрант</b> (44, 45, 46, 47)																		
<b>G4</b>																			
1 G4	<b>1-й квадрант</b> (14, 15, 16, 17)																		
2 G4	<b>2-й квадрант</b> (24, 25, 26, 27)																		
3 G4	<b>3-й квадрант</b> (34, 35, 36, 37)																		
4 G4	<b>4-й квадрант</b> (44, 45, 46, 47)																		

neo.lign «нео.лайн» Р		Цвета (классическая шкала цветов А-D)																
posterior / задняя сторона		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Полное протезирование		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Форма	Содержимое	Пожалуйста, укажите количество для заказа.																	
<b>L2</b>																			
Верхняя челюсть	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																		
Нижняя челюсть	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																		
<b>L3</b>																			
Верхняя челюсть	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																		
Нижняя челюсть	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																		
<b>L4</b>																			
Верхняя челюсть	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																		
Нижняя челюсть	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																		

Отправитель (печать)	№ клиента
	Дата, подпись

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

4 Гель

из 8

Гель crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин»	Содержимое	REF	Количество
BL3	5 г	CLFNDBL3	
A1	5 г	CLFNDA10	
A2	5 г	CLFNDA20	
A3	5 г	CLFNDA30	
A3.5	5 г	CLFNDA35	
A4	5 г	CLFNDA40	
B1	5 г	CLFNDB10	
B2	5 г	CLFNDB20	
B3	5 г	CLFNDB30	
B4	5 г	CLFNDB40	
C1	5 г	CLFNDC10	
C2	5 г	CLFNDC20	
C3	5 г	CLFNDC30	
C4	5 г	CLFNDC40	
D2	5 г	CLFNDD20	
D3	5 г	CLFNDD30	
D4	5 г	CLFNDD40	

Гель crea.lign Транспа «креа.лайн Транспа»	Содержимое	REF	Количество
clear / прозрачный	5 г	CLFN00T1	

Гель crea.lign Modifier «креа.лайн Модифаер»	Содержимое	REF	Количество
M1 beige / бежевый	5 г	CLFN00M1	
M2 oliv / оливковый	5 г	CLFN00M2	
M3 caramel / карамель	5 г	CLFN00M3	
M4 lila / лиловый	5 г	CLFN00M4	
M5 umbra / умбра	5 г	CLFN00M5	

Гель crea.lign Enamel / Incisal «креа.лайн Инэмэл» / «режущий край»	Содержимое	REF	Количество
E1	5 г	CLFN00E1	
E2	5 г	CLFN00E2	
E3	5 г	CLFN00E3	
E4	5 г	CLFN00E4	
I1 opal / опал	5 г	CLFN00I1	
I2 blue / синий	5 г	CLFN00I2	
I3 rose / розовый	5 г	CLFN00I3	
I4 universal / универсальный	5 г	CLFN00I4	

Гель crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ»	Содержимое	REF	Количество
G1 light / светлый	5 г	CLFN00G1	
G2 rosa / бледно-розовый	5 г	CLFN00G2	
G3 pink / розовый	5 г	CLFN00G3	
G4 red / красный	5 г	CLFN00G4	

crea.lign Stains «креа.лайн Стэйнз»	Содержимое	REF	Количество
S1 orange / оранжевый	1,4 г	CLFN00S1	
S2 brown / коричневый	1,4 г	CLFN00S2	

Держатель|Поворотный клапан

Держатель	Содержимое	REF	Количество
для геля crea.lign «креа.лайн»	1 шт.	32000442	

Поворотный клапан	Содержимое	REF	Количество
для пасты crea.lign «креа.лайн»	1 шт.	32000444	

Паста

Паста crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин»	Содержимое	REF	Количество
BL3	3 г	CLPNDBL3	
A1	3 г	CLPNDA10	
A2	3 г	CLPNDA20	
A3	3 г	CLPNDA30	
A3.5	3 г	CLPNDA35	
A4	3 г	CLPNDA40	
B1	3 г	CLPNDB10	
B2	3 г	CLPNDB20	
B3	3 г	CLPNDB30	
B4	3 г	CLPNDB40	
C1	3 г	CLPNDC10	
C2	3 г	CLPNDC20	
C3	3 г	CLPNDC30	
C4	3 г	CLPNDC40	
D2	3 г	CLPNDD20	
D3	3 г	CLPNDD30	
D4	3 г	CLPNDD40	

Жидкость

Жидкость	Содержимое	REF	Количество
Моделирующая жидкость crea.lign «креа.лайн»	10 мл	CLFMOD10	

Кольцо с образцами цветов

Кольцо с образцами цветов crea.lign «креа.лайн»	Содержимое	REF	Количество
Оттенок дентина (незаполненное)	1 шт.	9925CSLA	
Incisal «креа.лайн режущий край», Stains «Стэйнз» и GUM «ГАМ» (незаполненное)	1 шт.	9925CSLB	

Красители

visio.paint «визио.пейнт»	Содержимое	REF	Количество
white / белый	3 мл	54001251	
blue / синий	3 мл	54001252	
black / черный	3 мл	54001253	
ivory / слоновая кость	3 мл	54001254	
ocher / охра	3 мл	54001255	
ebony / черное дерево	3 мл	54001256	

Инструменты|Принадлежности

Подставка для шприцев для геля crea.lign «креа.лайн»	Содержимое	REF	Количество
Нержавеющая сталь, для 6 шприцев	1 шт.	32000960	
Пластмасса, для 12 шприцев	1 шт.	32000443	

Инструменты и принадлежности	Содержимое	REF	Количество
Одноразовая кисточка	100 шт.	33001142	
Держатель кисточек (белый)	12 шт.	33001149	
Шпатель (белый)	100 шт.	33001143	
Одноразовая чашка	12 шт.	23000130	
Блок для замешивания (большой, 100 листов)	1 шт.	32000460	
Блок для замешивания (маленький, 100 листов)	10 шт.	33001144	
Канюли для нанесения + Pin Cover / колпачок <sup>1)</sup> для геля crea.lign «креа.лайн»	10+10 шт.	32000940	
Pin Cover / колпачок <sup>1)</sup>	50 шт.	32000950	

прочие инструменты и принадлежности → см. на листе

5

Отправитель (печать)

№ клиента

Дата, подпись

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

Компания оставляет за собой право на ошибку и внесение изменений.

<sup>1)</sup> Защитные колпачки для канюль для нанесения

5 Воск

Воск beauty setup «бьюти сетап»	Содержимое	REF	Количество
hell / светлый	25 г	43000300	
dunkel / темный	25 г	43000310	

Праймер

Связующие материалы	Содержимое	REF	Количество
<b>MKZ Праймер</b> (сцепление композита с металлическим каркасом)	4 мл	MKZ02004	
<b>Активатор MKZ EM</b> (для благородных металлов) <i>Применение только в сочетании с грунтовыми составом MKZ!</i>	4 мл	MKZEM004	
<b>K Праймер</b> (сцепление композита с огнеупорной керамикой)	3 мл	APK25003	
<b>visio.link «визио.линк»</b> (сцепление композита с полимерами)	10 мл	VLPMMMA10	

Силиконы

Силиконы visio.sil «визио.сил»	Содержимое	REF	Количество
visio.sil «визио.сил»	50 мл	54001200	
visio.sil fix «визио.сил фикс»	50 мл	54001300	
visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти»	12 шт.	54001400	
Диспенсер для силиконов visio.sil «визио.сил»	1 шт.	32000440	
Смесительные канюли для visio.sil fix «визио.сил фикс» (разм. 1)	12 шт.	32000451	
Смесительные канюли для visio.sil «визио.сил» и visio.sil ILT «визио.сил Ай-Эл-Ти» (разм. 4)	12 шт.	32000457	

Опакеры crea.lign «креа.лайн»

Опакеры crea.lign «креа.лайн»	Содержимое	REF	Количество
цвет 1 (A1, B2)	4 г	CLFHOP01	
цвет 2 (A2)	4 г	CLFHOP02	
цвет 3 (A3, D3)	4 г	CLFHOP03	
цвет 4 (B1, C1, BL3)	4 г	CLFHOP04	
цвет 5 (C2, C3, D2, D4)	4 г	CLFHOP05	
цвет 6 (B3, B4)	4 г	CLFHOP06	
цвет 7 (A3.5)	4 г	CLFHOP07	
цвет 8 (A4, C4)	4 г	CLFHOP08	
GUM	4 г	CLFHOGUM	
Опакер crea.lign «креа.лайн» Z	Содержимое	REF	Количество
Лайнер для циркония (прозрачный)	4 г	CLFHOP0Z	

Опакеры combo.lign «комбо.лайн»

Опакеры combo.lign «комбо.лайн»	Содержимое	REF	Количество
light / светлый (A1-A3, B1-B2, C2, C1)	4 г	CO1X4OPL	
medium / средний (A3.5, B3-B4, D2, D3)	4 г	CO1X4OPM	
intensiv / интенсивный (A4, C3-C4, D4)	4 г	CO1X4OPI	
GUM (десна)	4 г	CO1X4OPG	
Катализатор для опакера combo.lign «комбо.лайн»	Содержимое	REF	Количество
для всех цветов	4 г	CO1X4KAT	

Композитный цемент combo.lign «комбо.лайн»

		Цвета (классическая шкала цветов A-D)																	
		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	(десна)	
Композитный цемент combo.lign «комбо.лайн»	8 г	BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	GUM
		Пожалуйста, укажите количество для заказа.																	

Инструменты | Принадлежности

Дополнительные комплектующие к стартовому набору	Содержимое	REF	Количество
crea.lign Surface Cleaner «креа.лайн Сёфис Клинер»	125 мл	43000600	
Поліровочная паста Асгурол «Акрипол»	170 г	52000170	
Abraso-Starglanz «Абрасо-Старглянц»	2 x 50 мл	52000163	
Твердосплавная фреза Diatit «Диатит» 	1 шт.	D198KF23	
Твердосплавная фреза 	1 шт.	H237MH23	
Твердосплавная фреза 	1 шт.	H277MH14	
Твердосплавная фреза 	1 шт.	H274GH40	
Высокоскоростная мандрель (размер 2)	10 шт.	36001153	
Линза Seagum «Керагам» (средняя)	12 шт.	PLKM2212	
Алмазный диск	1 шт.	34000520	
Круглая щетка Abraso-fix «Абрасо-фикс»	8 шт.	35000752	
Хлопковый полировальный круг	15 шт.	35000650	
Шестиугольная щетка	15 шт.	52000141	
Стеклобанка для Abraso-Starglanz «Абрасо-Старглянц» (густая)	1 шт.	39000375	

combo.lign «комбо.лайн» Принадлежности	Содержимое	REF	Количество
Диспенсер для композитного цемента combo.lign «комбо.лайн»	1 шт.	32000441	
Смесительные канюли для композитного цемента combo.lign «комбо.лайн»	10 шт.	COMKG210	

bre.Lux Power Unit «бре.Люкс Пауэр Юнит»	Содержимое	REF	Количество
<b>Аппарат полимеризации</b> • bre.Lux LED N «бре.Люкс ЛЕД Эн» (переносная лампа со спиральным кабелем) • bre.Lux UpDown «бре.Люкс АпДаун» • гибкий шланг • сетевой кабель	1 шт.	14000970	

Thermo Pen «Термо Пэн»	Содержимое	REF	Количество
Устройство для обдувки с пьезо-механизмом	1 шт.	11001470	

Шкаф для зубов

Шкаф для хранения зубов visio.lign «визио.лайн»	Содержимое	REF	Количество
с вкладками для выдвижных ящиков	1 шт.	VLIGNBOX1	

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

Отправитель (печать)

№ клиента

Дата, подпись

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

6 Наборы crea.lign «креа.лайн»

из 8

Стартовый набор crea.lign «креа.лайн», паста 7 цветов	Содержимое	Количество
REF CLPNSET7		
Паста crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин» A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3	по 1 x 3 г	
Поворотный клапан для пасты crea.lign «креа.лайн»	7 шт.	

Тестовый набор crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл»	Цвет	REF	Количество
• 1 x 3 г пасты crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин»	A2	CLFKSETA20	
• 1 x 5 г геля crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин»	A3	CLFKSETA30	
• 1 x 5 г геля crea.lign Incisal «креа.лайн Инсайзл»			
• 1 x 4 г опакера crea.lign «креа.лайн»	A3.5	CLFKSETA35	
<i>Гель crea.lign Incisal «креа.лайн Инсайзл» и опакер crea.lign «креа.лайн» поставляются в цветах, соответствующих выбранным!</i>			

Комплект crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл»,	Содержимое	Количество
REF CLIGNSETFK		
Алюминиевый чемоданчик (ширина 42,5 см x высота 43,5 см x глубина 20,5 см)	1 шт.	
Паста crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин» A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	по 1 x 3 г	
Гель crea.lign Dentin «креа.лайн режущий край» A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign Incisal «креа.лайн режущий край» E1, E2, E3, E4, I1 oral / опал, I2 blue / синий, I3 rose / розовый I4 universal / универсальный	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ» G1 light / светлый, G2 rosa / бледно-розовый, G3 pink / розовый, G4 red / красный	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign Транспа «креа.лайн Транспа» clear / прозрачный	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign Modifier «креа.лайн Модифаер» M1 beige / бежевый, M2 olive / оливковый, M3 caramel / карамель, M4 lila / лиловый; M5 umbra / умбра	по 1 x 5 г	
crea.lign Stain «креа.лайн Стэйн» S1 orange / оранжевый, S2 brown / коричневый	по 1 x 1,4 г	
Опакер crea.lign «креа.лайн» 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3/D3), 4 (B1/BL3/C1), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), GUM	по 1 x 4 г	
Опакер crea.lign «креа.лайн» Z (лайнер для циркония) transparent / прозрачный	по 1 x 4 г	
Моделирующая жидкость crea.lign «креа.лайн»	1 x 10 мл	
Набор красителей visio.paint «визио.пейнт»	1 набор	
Канюли для нанесения геля crea.lign «креа.лайн» + колпачок (защитный колпачок)	на 2 x 10 шт.	
visio.link «визио.линк» (сцепление композита с полимерами)	1 x 10 мл	
К Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и керамикой)	1 x 3 мл	
MKZ Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и огнеупорной керамикой)	1 x 4 мл	
Активатор MKZ EM (сцепление композита со сплавом EM, 1:1 в сочетании с эррунтовочным составом MKZ)	1 x 4 мл	
Держатель для нанесения геля crea.lign «креа.лайн» одной рукой	12 шт.	
Подставка для шприцев crea.lign «креа.лайн» (нержавеющая сталь)	2 шт.	
Поворотный клапан для пасты crea.lign «креа.лайн»	17 шт.	
Блок для замешивания (маленький)	2 шт.	
Шпатель	1 шт.	
Одноразовая кисточка	20 шт.	
Держатель кисточки	1 шт.	
Одноразовая чашка	1 x 12 шт.	
Кольца с образцами цвета crea.lign «креа.лайн»: оттенок дентина (незаполненное) и Incisal «режущий край», Stains «Стэйнз» и GUM «ГАМ» (незаполненное)	по 1 шт.	
Информационная папка visio.lign «визио.лайн»	1 шт.	

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

Отправитель (печать)	№ клиента
	Дата, подпись

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

**7** Наборы crea.lign «креа.лайн»

из 8

Набор «красна-белая эстетика»	Содержимое	Количество
<b>REF CLIGNSETG</b>		
Алюминиевый чемоданчик	1 шт.	
Гель crea.lign Incisal «креа.лайн режущий край» ■ I1 opal / опал, ■ I2 blue / синий	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ» ■ G1 light / светлый, ■ G2 rosa / бледно-розовый, ■ G3 pink / розовый, ■ G4 red / красный	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign Modifier «креа.лайн Модифаер» ■ M1 beige / бежевый, ■ M4 lila / лиловый	по 1 x 5 г	
Опакер combo.lign «комбо.лайн» ■ GUM (десна)	1 x 4 г	
Моделирующая жидкость crea.lign «креа.лайн»	1 x 10 мл	
Канюли для нанесения геля crea.lign «креа.лайн»	8 шт.	
visio.link «визио.линк»(сцепление композита с полимерами)	1 x 10 мл	
MKZ Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и огнеупорной керамикой)	1 x 4 мл	
Держатель для нанесения геля crea.lign «креа.лайн» одной рукой	1 шт.	
Блок для замешивания (большой)	1 шт.	
Кисточка Magic Brush «Мэджик Бреш», № 2	2 шт.	
Руководство по наслоению	1 шт.	
Демонстрационный протез	2 шт.	

Набор «Починка керамики», для стоматологов	Содержимое	Количество
<b>REF CLIGNSETA</b>		
Алюминиевый чемоданчик	1 шт.	
visio.link «визио.линк»(сцепление композита с полимерами)	1 x 10 мл	
К Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и керамикой)	1 x 3 мл	
MKZ Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и огнеупорной керамикой)	1 x 4 мл	
Активатор MKZ EM (сцепление композита со сплавом EM, 1:1 в сочетании с грунтовочным составом MKZ)	1 x 4 мл	
Паста crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин» ■ A2, ■ A3	по 1 x 3 г	
Гель crea.lign Dentin «креа.лайн Дентин» ■ A2, ■ A3	по 1 x 5 г	
Гель crea.lign Incisal «креа.лайн Инсайзл» ■ E1	по 1 x 5 г	
Опакер crea.lign «креа.лайн» ■ 2 (A2), ■ 3 (A3/D3)	по 1 x 4 г	
Опакер crea.lign «креа.лайн» Z (лайнер для циркония) ■ transparent / прозрачный	по 1 x 4 г	
Поворотный клапан для пасты crea.lign «креа.лайн»	17 шт.	
Канюли для нанесения геля crea.lign «креа.лайн» + колпачок (защитный колпачок)	на 2 x 10 шт.	
Одноразовая чашка	1 x 12 шт.	
Вкладыш с инструкцией по обработке	1 шт.	

Набор «Починка керамики», для зубных техников	Содержимое	Количество
<b>REF CLIGNSETT1</b>		
Пластмассовый кейс	1 шт.	
visio.link «визио.линк»(сцепление композита с полимерами)	1 x 10 мл	
К Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и керамикой)	1 x 3 мл	
MKZ Праймер (сцепление композита со сплавом NEM и огнеупорной керамикой)	1 x 4 мл	
Активатор MKZ EM (сцепление композита со сплавом EM, 1:1 в сочетании с грунтовочным составом MKZ)	1 x 4 мл	
Обзор грунтовочных составов – показания и применение	1 шт.	
Одноразовая чашка	1 x 12 шт.	

Отправитель (печать)

№ клиента

Дата, подпись

**Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.**

bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

## 8 Наборы опакеров

из 8

Набор опакеров combo.lign «комбо.лайн»	Содержимое	Количество
<b>REF OLIGNSET1</b>		
Катализатор combo.lign «комбо.лайн»	2 x 4 г	
Опакер combo.lign «комбо.лайн» light / светлый, medium / средний, intensiv / интенсивный, GUM (десна)	по 1 x 4 г	

Набор опакеров crea.lign «креа.лайн»	Содержимое	Количество
<b>REF CLFHOPSET</b>		
Опакер crea.lign «креа.лайн» 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3/D3), 4 (B1/C1/BL3), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), GUM (десна)	по 1 x 4 г	

Отправитель (печать)

## Набор красителей

Набор красителей visio.paint «визио.пейнт»	Содержимое	Количество
<b>REF 54001250</b>		
Красители white / белый, blue / синий, black / черный, ivory / слоновая кость, ocher / охра, ebony / черное дерево	по 1 x 3 мл	
Одноразовая кисточка	6 шт.	
Держатель кисточки	1 шт.	
Блок для замешивания (маленький)	1 шт.	

## Набор для обработки

Набор инструментов visio.lign® «визио.лайн»	Содержимое	Количество
<b>REF VLTOOLKIT</b>		
Набор для обработки композитного полимера	1 набор	

Дополнительные комплектующие к стартовому набору → см. на листе

5

№ клиента

Дата, подпись

## Системные наборы для максимальной гибкости.

Системные наборы visio.lign «визио.лайн» гарантируют наивысшую гибкость – при работе с винировыми фасетками novo.lign «ново.лайн» и цельными зубами neo.lign «нео.лайн» – как с точки зрения подбора форм зубов, так и с точки зрения выбора цветов.

Аналогичным образом вы также можете выбирать из широкого разнообразия оттенков цвета входящих в системные комплекты компонентов crea.lign «креа.лайн» и combo.lign «комбо.лайн» (например, опакер, композитный цемент, гель, паста) в соответствии с вашими пожеланиями.

Мы с радостью предоставим вам консультацию относительно возможностей индивидуального комбинирования цветов в рамках наборов и предлагаем вам заказать любые из приведенных ниже наборов **через филиал bredent group «Бредент груп» или нашего торгового партнера в вашем регионе.**

Информация о наборах, входящих в указанные наборы, и их количестве приведена в документе «Представление системы visio.lign» («visio.lign Systemvorstellung») в соответствующем разделе «Наборы».

Наборы visio.lign® «визио.лайн»	REF
Стартовый набор visio.lign® «визио.лайн» 2	VLIGNSET2
Стартовый набор visio.lign® «визио.лайн» 3	VLIGNSET3
Стартовый набор visio.lign® «визио.лайн» 4	VLIGNSET4
Расширенный набор visio.lign® «визио.лайн» N	VLUPSETN
Набор visio.lign® «визио.лайн» PRVC	VLIGNPRVC
Наборы novo.lign «ново.лайн»	REF
Актуальная карта форм novo.lign «ново.лайн» A и P	VLIGNPRVN
Расширенный набор novo.lign «ново.лайн» P	VLIGNSETP
Наборы neo.lign «нео.лайн»	REF
Актуальная карта форм neo.lign «нео.лайн» A и P	VLIGNPRVT
Набор из 28-ми зубов neo.lign «нео.лайн» (только для Германии и лишь 1 на клиента!)	NL28FOR28
Расширенный набор neo.lign «нео.лайн» A и P	NLUPSET2
Наборы crea.lign «креа.лайн»	REF
Стартовый набор crea.lign «креа.лайн» с держателем для шприцев (пластмасса)	CLIGNSET12
Стартовый набор crea.lign «креа.лайн» N	CLIGNSETN
Набор crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл» FN	CLIGNSETFN
Набор crea.lign freestyle «креа.лайн фристайл» FH	CLIGNSETFH

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com