

crea.lign

«креа.лайн»


на базе технологии **visio.lign** «визио.лайн»

Схема послойного нанесения для индивидуальной ЭСТЕТИКИ ДЕСЕН И ЗУБОВ

Руководство по наслоению crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ»



Бежевый цвет используется для воспроизведения кости.

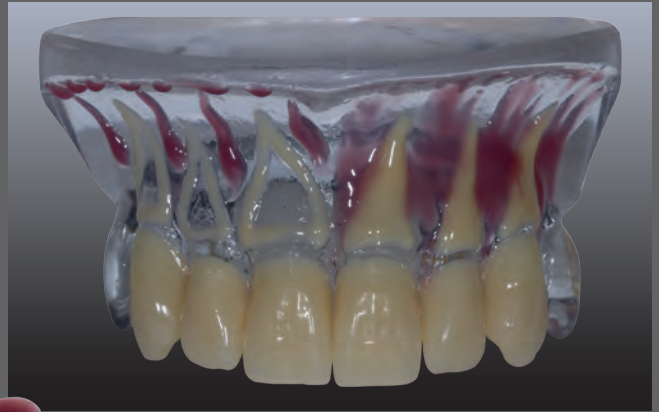

С помощью лилового цвета достигается эффект глубины. Он распределяется от переходной складки к зубам.



Бледно-розовый цвет позволяет смягчить резкость предыдущих слоев.



Розовым тоном оттеняют альвеолы.



С помощью красного цвета выделяют те участки, которые хорошо снабжаются кровью.



Светлый тон используется в области десневого края.



Прозрачный цвет наносится на всю поверхность в качестве завершающего слоя.

bredent

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · Эл. почта: info@bredent.com

crea.lign

«креа.лайн»

на базе технологии **visio.lign** «визио.лайн»

Схема послойного нанесения для индивидуальной ЭСТЕТИКИ ДЕСЕН И ЗУБОВ

Руководство по наслоению пасты crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ»



Пастой RO формируется пограничный участок.



Паста PL используется для воссоздания альвеол.



Светлый тон наносится в области десневого края.



С помощью фиолетового цвета достигается эффект глубины.



С помощью красного цвета выделяют те участки, которые хорошо снабжаются кровью.



Прозрачный цвет наносится на всю поверхность в качестве завершающего слоя.

bredent

Пожалуйста, обращайтесь в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · Эл. почта: info@bredent.com

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений 009485RU-20160411

